

# Papel Grau Cirúrgico para Esterilização em Rolo Zelara

Garanta a máxima proteção e esterilização dos seus instrumentos de trabalho com o Papel Grau Cirúrgico para Esterilização em Rolo Zelara: a escolha ideal para profissionais que visam segurança e zelo em todos os seus trabalhos.

Com material de alta qualidade e indicadores visuais de esterilização, a linha Zelara oferece a confiança e a eficiência que você precisa no dia a dia para uma esterilização completa.

## Flexibilidade e Praticidade

Fácil de recortar no tamanho ideal para a sua demanda. Feito com material de qualidade, alta resistência e com baixo resíduo após a esterilização.

## Durabilidade

Mantém a esterilidade por até 6 meses (Vapor) e 24 meses (Óxido de Etileno) em temperatura ambiente (15-25°) e umidade abaixo de 70% enquanto selado.

## Visibilidade

Filme transparente que permite a visualização clara do conteúdo, prevenindo erros.



**Alta Qualidade**  
Papel médico importado de alta qualidade, com grande capacidade de bloqueio bacteriano.

**Indicação de Mudança de Cor**  
Indicadores que mudam de cor com o êxito da esterilização, garantindo a confirmação visual do processo.

**Segurança e Esterilidade**  
Papel asséptico e antiaderente após a esterilização.

## Tamanhos disponíveis

| Código | Tamanho    | Código | Tamanho    |
|--------|------------|--------|------------|
| 33445  | 50mmx100m  | 33452  | 300mmx100m |
| 33446  | 80mmx100m  | 33453  | 350mmx100m |
| 33447  | 100mmx100m | 33454  | 400mmx100m |
| 33448  | 120mmx100m | 33455  | 450mmx100m |
| 33449  | 150mmx100m | 33456  | 500mmx100m |
| 33450  | 200mmx100m | 33457  | 600mmx100m |
| 33451  | 250mmx100m |        |            |



## A escolha certa para:

Hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, laboratórios, salões e studios de beleza, manicure e outros locais que utilizam materiais esterilizados.

**zelara**

**zela por você.**

# Papel Grau Cirúrgico para Esterilização em Rolo Zelara



## Instruções de uso

1. Escolha o rolo de esterilização adequado ao tamanho dos dispositivos médicos e recorte o tamanho necessário para o processo.
2. Recomenda-se fazer a marcação no verso listando os itens e data da esterilização.
3. Insira os dispositivos médicos limpos e secos.
4. Importante: O material não deve exceder 3/4 do comprimento do rolo a fim de garantir a vedação adequada;
5. Sele com equipamento de selagem.
6. Esterilize em equipamento apropriado (vapor ou óxido de etileno).
7. Confirme a mudança de cor na marcação do envelope:  
**A. De azul para cinza-escuro após a esterilização a vapor;**  
**B. De rosa para amarelo após a esterilização por Óxido de Etileno;**
8. Armazene os pacotes esterilizados em local limpo, seco e protegido da luz e umidade.

## Recomendações pós-esterilização

Armazenar sob condições adequadas (temperatura entre 15°C a 25°C e umidade abaixo de 70%).

Recomenda-se o uso dentro de 6 meses para esterilização a vapor e 24 meses para esterilização com óxido de etileno.

Produto isento de notificação ANVISA

**Composição:** Papel Grau Cirúrgico, CPP (Polipropileno Cast), PET (Polietileno) e indicadores reagentes.  
Transportar e Armazenar protegido da luz, calor e umidade.  
Fabricado na China.

## Adquira o Papel Grau Cirúrgico para Esterilização em Rolo Zelara:

Distribuidor Oficial (CNPJ)

**SUPERMED**

(11)4934-1700

Varejo e CPF



[www.sousuper.com.br](http://www.sousuper.com.br)



**mercado  
livre**

[www.mercadolivre.com.br/pagina/zelara](http://www.mercadolivre.com.br/pagina/zelara)

**Importado e Distribuído por:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.  
**CNPJ:** 11.206.099/0001-07 **Endereço:** Rua Projetada S/N  
**Bairro:** Itaim – **Cidade:** Cambuí/MG **CEP:** 37600-000  
**Telefone:** (11)4934-1700 - **Site:** [www.supermed.net.br](http://www.supermed.net.br)  
**E-mail:** [sac@supermed.net.br](mailto:sac@supermed.net.br)



**Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**

**Telefone:** (11)4934-1700

**Site:** [www.supermed.net.br](http://www.supermed.net.br)

**E-mail:** [sac@supermed.net.br](mailto:sac@supermed.net.br)

[www.zelara.com.br](http://www.zelara.com.br)

 [@zelarabr](https://www.instagram.com/zelarabr)

**zelara**

**zela por você.**