

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO (sem formatação)

EQUIPO ENTERAL APPLIX



7751731 - SMART EASYBAG

751731SA - SMART EASYBAG

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL


O Equipamento Enteral Applix Smart EasyBag está em conformidade com os padrões internacionais, é um produto estéril, de uso único e compatível apenas com as bombas de infusão Applix.

O Equipamento Enteral Applix Smart EasyBag foi projetado para ser utilizado na administração de nutrição enteral bolsa (Bag).

Para a perfeita utilização dos equipamentos Applix Smart EasyBag, deve-se preparar o recipiente de solução (Bolsa) com o equipamento de administração correspondente, em conformidade com os procedimentos padrão.


MONTAGEM DO EQUIPO (BOLSA)

Observação: Para o *priming* do equipamento favor verificar o item inicialização da bomba

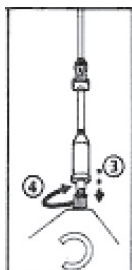


Fechando a pinça corta fluxo.

Inserir a ponta em bisel do equipamento na bolsa, rosquear até o travamento do equipamento (3 e 4).

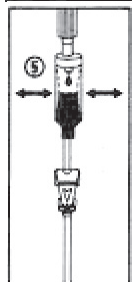

Encher a câmara de gotejamento pela metade, pressionando suavemente (5).

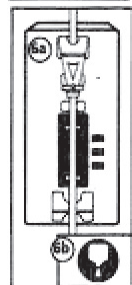

Para preenchimento do equipamento através da bomba, inserir o sistema com o corta fluxo fechado (6a). Fechar a porta se necessário e pressionar o botão



(6b) até o completo preenchimento do equipamento.




Retirar o conector escalonado (7).
Conectar a via de administração (8 e 9).

Para preenchimento manual do equipo abrir a pinça corta fluxo até que o nível desejado de nutrição esteja no tubo. Fechar a pinça corta fluxo e conectar a via de administração

INSTALAÇÃO DO EQUIPO NA BOMBA


1. Destravar e abrir a porta da bomba com a alavanca da porta.
2. Inserir a pinça corta fluxo do equipo na bomba, de acordo com a indicação da seta, com a alavanca da pinça apontada para cima.
3. Posicionar o equipo por cima do mecanismo de bomba e fixar na guia de tubo inferior, certificando-se de que ela esteja em linha reta e esteja levemente esticada.
4. Empurrar e fechar a porta da bomba e certificar-se de que ela se fixe apropriadamente.

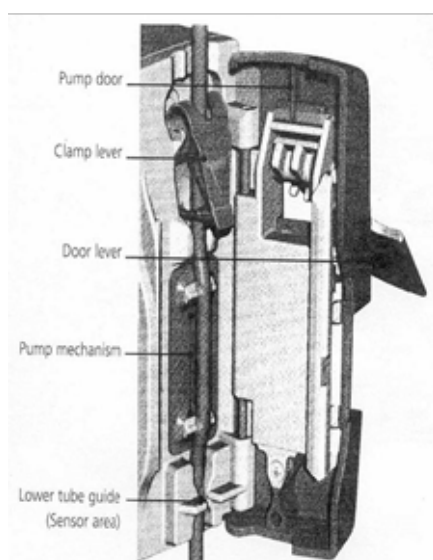

Legenda:


Pump door: Porta da bomba
Clamp lever: Alavanca da pinça
Door lever: Alavanca da porta
Pump mechanism: Mecanismo de bomba
Lower tube guide (sensor área): Guia de tubo inferior (área de sensor)

LAVAGEM OU DESOBSTRUÇÃO DO EQUIPO

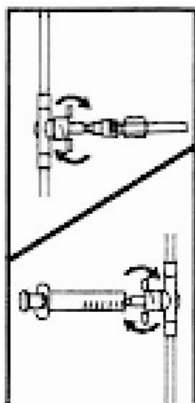

1. Optar pela utilização de seringa ou sistema de água auxiliar
2. Inserir na peça em "T" a seringa com água ou o conector do sistema de água auxiliar.
3. Abrir a válvula da Peça em "T".
4. Inserir a quantidade de água necessária para lavagem do equipo ou desobstrução do tubo.

CONEXÃO DO EQUIPO NA SONDA

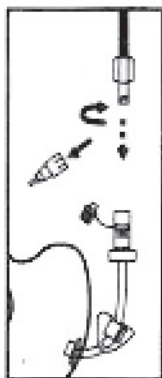

Conforme a sonda a ser utilizada (nasogástrica / duodenal ou jejunal) conecte a sonda na extremidade oposta ao adaptador Varioline para o início do procedimento.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS COM O PRODUTO:

- Não utilizar por via parenteral.
- Não utilizar por período superior a 24 horas.
- Produto médico de uso único.
- Não utilizar após a data de validade.
- Proibido re-processar.
- Destruir após o uso.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.
- Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.

FABRICADO POR:

Fresenius Kabi AG

D-61346, Bad Homburg

Alemanha

IMPORTADO/DISTRIBUÍDO POR:

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652
Barueri-SP
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04
SAC: 0800 707 3855

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Cíntia Motta Pereira Garcia
CRF-SP: 34.871

Registro ANVISA nº 80145110170

Estéril – Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Manter em temperatura ambiente, protegido de umidade e da luz solar.

Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto.