

# Sonda de Foley Descarpack



## DADOS TÉCNICOS

- Confeccionada em látex de borracha natural siliconizado;
- Estéril;
- Balão com diferentes capacidades de enchimento;
- Superfície lisa e com textura macia;
- Conector universal para sistema de escoamento de urina, permitindo a adaptação com qualquer tipo de bolsa coletora de urina;
- Diferentes tamanhos para cada necessidade, reduzindo assim os riscos de lesões na uretra e a falha nos tratamentos;
- Possuem diversos tamanhos diferenciados pela cor presente na ponta do funil de enchimento, além disto também estão indicados o tamanho em french (Fr) e a capacidade de enchimento do balão em mililitro (mL);
- Embaladas individualmente em invólucro de plástico e em filme termoplástico e papel grau cirúrgico;
- A Sonda de Foley Descarpack deve ser introduzida na cavidade vesical, pela uretra, sendo indicada para o esvaziamento da bexiga de pacientes com retenção urinária, obtenção de urina asséptica, preparo cirúrgico, pós operário, monitoramento do débito urinário, dentre outros.

## MODELOS DISPONÍVEIS

Tamanho	Vias	Volume do Balão	Cor
12 Fr	2	5 - 10 mL	Branco
12 Fr	2	30 mL	Branco
14 Fr	2	5 - 10 mL	Verde
14 Fr	2	30 mL	Verde
16 Fr	2	5 - 10 mL	Laranja
16 Fr	2	30 mL	Laranja
18 Fr	2	5 - 10 mL	Vermelho
18 Fr	2	30 mL	Vermelho

## MODELOS CADASTRADOS

Tamanho	Vias	Volume do Balão	Cor
8 Fr	2	3 mL	Preto
8 Fr	2	3 - 5 mL	Preto
10 Fr	2	3 mL	Cinza
10 Fr	2	3 - 5 mL	Cinza
10 Fr	2	5 mL	Cinza
12 Fr	2	5 - 10 mL	Branco
12 Fr	2	5 - 15 mL	Branco
12 Fr	2	30 mL	Branco
14 Fr	2	5 - 10 mL	Verde
14 Fr	2	5 - 15 mL	Verde
14 Fr	2	30 mL	Verde
16 Fr	2	5 - 10 mL	Laranja
16 Fr	2	5 - 15 mL	Laranja
16 Fr	2	30 mL	Laranja
18 Fr	2	5 - 10 mL	Vermelho
18 Fr	2	5 - 15 mL	Vermelho
18 Fr	2	30 mL	Vermelho
20 Fr	2	5 - 10 mL	Amarelo
20 Fr	2	5 - 15 mL	Amarelo
20 Fr	2	30 mL	Amarelo
20 Fr	2	50 mL	Amarelo
22 Fr	2	5 - 10 mL	Roxo
22 Fr	2	5 - 15 mL	Roxo
22 Fr	2	30 mL	Roxo
22 Fr	2	50 mL	Roxo
24 Fr	2	5 - 10 mL	Azul
24 Fr	2	5 - 15 mL	Azul
24 Fr	2	30 mL	Azul
24 Fr	2	50 mL	Azul
26 Fr	2	5 - 10 mL	Rosa

26 Fr	2	5 - 15 mL	Rosa
26 Fr	2	30 mL	Rosa
26 Fr	2	50 mL	Rosa

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Selecionar o modelo e tamanho adequado;
  2. Avaliar as condições da embalagem e o prazo de validade;
  3. Separar material necessário para realização do procedimento;
  4. Realizar higiene íntima, se necessário;
  5. Abrir a embalagem utilizando técnica estéril;
  6. Verificar se a sonda de Foley Descarpack não possui alguma falha mecânica;
  7. Realizar o teste de enchimento do balão utilizando uma seringa estéril contendo água para injetáveis a fim de certificar que não haja vazamentos;
  8. Conectar a sonda a bolsa coletora de urina;
  9. Realizar antissepsia do órgão genital conforme protocolo institucional;
  10. Lubrificar a parte distal da Sonda de Foley Descarpack, incluindo o balão. Utilizar apenas lubrificantes a base de água ou silicone;
  11. Inserir a Sonda de Foley Descarpack cuidadosamente no meato urinário, utilizando técnica estéril;
  12. Caso haja resistência, parar e introduzir novamente;
  13. Após introduzir completamente a sonda, inflar o balão com água para injetáveis, não excedendo a capacidade indicada;
  14. Tracionar levemente até sentir resistência, o que indica o posicionamento correto do balão;
  15. Para confirmar o posicionamento correto da sonda, observar o retorno de urina através do funil de drenagem;
  16. Caso não ocorra retorno de urina imediato, realizar estímulo vesical superficial. Se persistir, refazer o procedimento;
  17. Fixar a sonda à perna do paciente com adesivo médico;
  18. Checar a sonda periodicamente;
- Nota:** O uso sucessivo da mesma sonda não deve ultrapassar 30 dias.
19. Antes de retirar a sonda, esvaziar o balão;

20. Descartar em local apropriado.

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Tubo de látex siliconizado estéril;
- Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Antes de usar, leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar pomadas lubrificantes à base de petróleo;
- Não utilizar caso a embalagem esteja danificada;
- Não utilizar se estiver fora do prazo de validade;
- Este produto não deve ser utilizado em casos de prostatite, trauma pélvico/uretral, uretrite grave, estenose uretral grave e traumatismo uretral agudo;
- Este produto deve ser manuseado apenas por profissionais devidamente habilitados;
- Após o uso descartar em local apropriado.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

Não aplicável

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto.

Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

## **CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO**

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente próprio para perfurocortantes (grupo E de acordo com a RDC 222/2018).

## **INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

**Fabricante Responsável:** Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd

**Importado e Distribuído por:** Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda

**Notificação Anvisa:** 10330660226

**Responsável Técnica:** Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269