

INSTRUÇÃO DE USO

CURATEC COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM **Estéril – Esterilizado por Radiação Ionizante**

DESCRIÇÃO

Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum é um curativo primário, estéril, não aderente, constituído por uma malha de acetato de celulose (Rayon) impregnada com uma emulsão de petrolatum, destinado ao tratamento de feridas.

O petrolatum é uma mistura de hidrocarbonetos obtida através da remoção de óleos de minerais e que contém propriedades benéficas para a pele e para o tratamento de feridas. Isso porque o petrolatum é um eficiente umectante, contribuindo para a hidratação de pele íntegras ou lesadas.

O produto é esterilizado pelo processo de radiação ionizante e deve ser combinado com um curativo secundário estéril para que seja possível a absorção do exsudato da ferida.

Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum é fácil de aplicar e em contato com a ferida não adere como as gazes comuns de algodão, sendo capaz de ser removido facilmente durante as trocas de curativo, minimizando dor e traumas durante o procedimento e diminuindo a perda do tecido recém formado, o que contribui para o processo de cicatrização.

O tecido de Rayon é sintético, inodoro, poroso, isento de substâncias alergênicas e apresenta bordas bem acabadas. Por ser poroso, o curativo permite a respirabilidade da ferida e o fluxo do exsudato para que seja absorvido pelo curativo secundário, evitando o acúmulo de fluido no local da lesão. Além disso, o tecido de Rayon pode ser recortado para atender a necessidade de diferentes tamanhos de feridas sem provocar o desprendimento de filamentos.

O produto Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum é um curativo confortável, pois mantém a ferida sempre úmida pela presença da emulsão de petrolatum e, quando acompanhado pelo curativo secundário, o produto é capaz de evitar a perda excessiva de líquidos e manter a temperatura no local da aplicação, pois diminui a perda de calor pela ferida.

MECANISMO DE AÇÃO

O mecanismo de ação do produto Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum é manter o meio hidratado por um processo não aderente, proporcionando um ambiente ideal para cicatrização e o amolecimento de possíveis tecidos inviáveis, sem agredir a ferida durante as trocas de curativo.

O amolecimento dos tecidos inviáveis presentes na lesão através da hidratação tem por objetivo favorecer seu desbridamento autolítico ou sua remoção mecânica, para que a presença não atrase o processo de cicatrização da pele.

Portanto, Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum estimula a

cicatrização da ferida por mantê-la úmida e por facilitar a retirada de tecidos inviáveis que atrasam este processo. Além disso, o processo de hidratação da ferida alivia a dor pela umidificação de possíveis terminações nervosas expostas na lesão.

INDICAÇÕES

Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum é indicado para o tratamento de feridas de qualquer etiologia, secas ou exsudativas, limpas ou infectadas, com presença de tecido inviável ou não e outros tipos de ferida em que se deve evitar a aderência do curativo, como por exemplo, feridas com exposição de ossos e tendões.

Essas indicações incluem vários tipos de lesões, como:

- Ferida cirúrgica;
- Queimaduras de segundo grau de pequena extensão;
- Áreas doadoras e receptoras de enxertos;
- Úlceras venosas, arteriais ou por pressão;
- Feridas com tecido de granulação;
- Áreas pós-trauma ou pós-resssecção cirúrgica.

CONTRAINDICAÇÕES

Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum não deve ser utilizado em pacientes com conhecida sensibilidade ao produto ou a algum de seus componentes. Além disso, seu uso não é indicado para pacientes que estejam recebendo tratamento por câmara hiperbárica.

INSTRUÇÃO DE USO

NOTA: O uso do produto Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum deve ser monitorado por um profissional da saúde, que deverá aplicar o produto de maneira higiênica, com luvas, para garantir segurança para si próprio e para o paciente.

As instruções de uso do produto consistem em:

- Irrigar bem a lesão com solução fisiológica a 0,9% ou conforme protocolo da instituição de saúde;
- Remover o excesso de exsudato e tecidos inviáveis, quando necessário;
- Limpar a pele ao redor e secar bem;
- Escolher o tamanho (apresentação) da compressa que melhor se adapte ao tamanho da ferida. A cobertura também pode ser aplicada dobrada ou cortada para se adequar a necessidade da ferida.
- Ocluir com uma cobertura secundária estéril e fixar.

INTERVALOS DE TROCA

O uso do produto Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum deve ser monitorado por um profissional da saúde, que indicará a frequência adequada das trocas do curativo. O produto deverá ser substituído sempre que for observada a diminuição de sua característica não aderente.

PRECAUÇÕES

O tratamento de feridas com o produto Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum deve ser monitorado por um profissional da saúde, para que o produto seja corretamente aplicado e para que seja indicada a frequência adequada das trocas de curativo.

O curativo Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum é um produto de uso único, não devendo ser reutilizado e devendo ser descartado depois da troca de curativo, sem qualquer precaução ou restrição específica. Deve-se agir conforme os procedimentos de manuseio de lixo hospitalar determinado pelo estabelecimento de saúde. Se o produto for reutilizado, o paciente possuirá grande risco de receber um tratamento não eficiente ou apresentar uma infecção no local da ferida ou generalizada, retardando o processo de cicatrização e prejudicando seriamente seu estado de saúde.

Em casos de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, suspenda a utilização imediatamente e procure orientação médica.

Não utilize o produto se a embalagem estiver violada e/ou danificada.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado à temperatura ambiente, mantendo-o na embalagem original, em ambiente fresco e ao abrigo da luz e umidade.

O prazo de validade de 2 anos é válido seguindo essas condições.

APRESENTAÇÕES

O produto é comercializado em envelopes hermeticamente fechados, que são acondicionados em cartuchos lacrados com selo de segurança e contendo folheto de instrução de uso.

Apresentações comercializadas em envelopes individuais:

- 7.6cm x 7.6cm; 7.6cm x 20.3cm; 7.6cm x 40.6cm; 7.6cm x 1.524m; 7.6cm x 2m; 10cm x 7.6cm; 10cm x 10cm; 10cm x 20.3cm; 10cm x 40cm; 10cm x 40.6cm; 10cm x 1.524m; 10cm x 2m; 5cm x 5cm; 7.5cm x 7.5cm; 7.5cm x 20cm; 7.5cm x 40cm; 10cm x 7m; 15cm x 2m.

Apresentações comercializadas em envelopes contendo três curativos:

7,6 cm x 20,3 cm; 10 cm x 20,3 cm.

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO. NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTIVER DANIFICADA / ABERTA.

Número de lote, data de validade e método de esterilização: vide cartucho ou envelope.

Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 – sac@br.urgo.com

Fabricado por:

LM Farma Indústria e Comércio Ltda

Rua Jaguarão, 95 - Chácaras Reunidas - São José dos Campos - SP

Indústria Brasileira

Resp. Técnica: Ana Elisa de Almeida Souza - CRF/SP: 42.184

Registro na ANVISA/MS nº: 80246910006

www.curatec.com.br

Responsável Legal
Fabio de Souza Ferreira

Responsável Técnica
Ana Elisa de Almeida Souza
CRF/SP: 42.184