



BELA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

FICHA TÉCNICA

Compressa Campo Operatório Não Estéril **Informações da Empresa Razão Social:**

BELA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNP7: 37.351.602/0001-01

Endereço: Avenida Montreal 445 , Jardim Canada , Minas Gerais CEP: 34007-720

AFE: 8.22729-3

Responsável Técnico: Thayná Marcele Martins Guedes CRFMG:34.980

Descrição do Produto:

- Nome Técnico: Compressas
- Nome Comercial: Compressa Campo Operatório Não Estéril com Elemento Radiopaco
- Tecido 100% algodão, de ligamento tela (tafetá), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido), com dispositivo para fixação, na forma de alça livre, e acabamento em overlock. Apresenta-se não estéril e com elemento radiopaco que é um material inócuo, impregnado com no mínimo de 55% de sulfato de bário, firmemente fixado ao seu corpo.
- Confeccionados em tecido macio e neutro;
- Altamente absorventes;
- Embalados em embalagens plásticas;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira



(31) 3665-9091

CNPJ 37.351.602/0001-01
INSC. ESTADUAL 003749153.00-01

Endereço: Avenida Montreal, 445
Nova Lima, Jardim Canada - MG
CEP - 34007-720



BELA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Apresentação do Produto:

- Embalagem plástica com 10, 20 , 30 , 40 , 50 unidades
- Dimensões: 10cm x 9cm; 23cm x 25cm; 25cm x 28cm; 45cm x 45cm; 45cm x 50cm;
- Peso: 6g; 7g; 8g; 9g; 15g; 18g; 20g; 22g; 25g; 27g; 30g;
- Com e sem pré-enchimento.

Indicação de Uso/Finalidade

A Compressa Campo Operatório Não Estéril com Elemento Radiopaco é indicada para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) antiaderente na contenção de hemorragias e ainda como anteparo traumático de vísceras e tecidos.

Instrução de Uso:

Retirar as compressas de campo operatório da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada que necessite que o sangue e/ou as secreções sejam absorvidos ou sobre a área da ferida aberta.

Armazenamento e Transporte:

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar. Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento e transporte do produto. Sendo assim, o produto pode ser armazenado e transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Produto pronto para uso não sendo necessário lavá-lo. Como é um produto não estéril há a necessidade de esterilizá-lo, caso utilize-o como um produto estéril.
- A esterilização da Compressa Campo Operatório Não Estéril com Elemento Radiopaco pode ser realizada utilizando os métodos de esterilização por óxido de etileno, raios gama ou autoclave a vapor.

Contraindicações:

Não se aplica. ~

Efeitos Adversos:

Não se aplica.



(31) 3665-9091

CNPJ 37.351.602/0001-01

INSC. ESTADUAL 003749153.00-01

Endereço: Avenida Montreal, 445

Nova Lima, Jardim Canada - MG

CEP - 34007-720