

INSTRUÇÃO DE USO – UROMED

Utilize técnica asséptica ao manusear o produto.

Para a correta utilização do produto, siga as instruções de uso abaixo:

- 1-Escolher o frasco adequado;**
- 2-Verificar se a embalagem está intacta;**
- 3-Retirar o frasco da embalagem em local limpo e asséptico;**
- 4-Retirar a mangueira de dentro do frasco;**
- 5-Fixar o frasco ao leito através de sua alça;**
- 6-Retirar a tampa do conector e proceder o seu encaixe à sonda;**
- 7-Substituir o frasco quando estiver cheio;**
- 8-Desprezar o conteúdo em local apropriado;**
- 9-Destruir o frasco após o uso.**
- 10-PROIBIDO REPROCESSAR**

PRECAUÇÕES:

- 2 anos de validade desde que a embalagem esteja inviolada.
- Produto de uso exclusivo para coleta de urina.
- Seguir as instruções do fabricante do produto. A não observação do modo de uso, precauções e contraindicações pode levar a danos ao paciente.
- Produto de reprocessamento proibido, conforme RE2605/2006.
- Armazenar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira, umidade e à temperatura ambiente (15 - 38° C). Transportar em caminhão fechado. Observar os cuidados de manuseio para não danificar a embalagem e o produto.
- Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou seu prazo de validade esteja vencido.
- A embalagem somente deverá ser aberta no momento de sua utilização e em condições assépticas.
- O produto deve ser manipulado somente em local limpo e asséptico.
- Produto para uso em ambiente médico-hospitalar.
- Produto atóxico e apirogênico, não apresentando risco para quem o manuseia.
- Produto recomendado para uso profissional.
- Não reutilizar ou re-esterilizar o produto.
- Não improvisar ou realizar adaptações ao produto.
- O descarte deste produto deve seguir os critérios de biossegurança vigentes.