

**ATADURA GESSADA****FTP-0003**

Elaborado Luciane Padilha	Aprovado Peterson H. Gomes	Data 28/09/2022	Revisão 00	Página 1 de 1
------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------	------------------

Atendimento à RDC nº 431/2020

Indicação: Usar para conter ou limitar movimentos de membros ou partes do corpo, por exemplo, em fraturas ósseas, lesões musculares, correções, terapias e outros.

Composição: É elaborado a partir de tecido ou não tecido, 100% algodão ou fibras manufaturadas (químicas artificiais ou sintéticas) ou mistas, isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido, impregnada uniformemente com gesso coloidal, derivados de celulose e solventes. A Atadura Gessada rápida tem um corte lateral sinuoso para evitar o desfiamiento durante o processo de confecção do aparelho gessado.

Orientação de uso: Abrir a embalagem apenas no momento do uso. Aplicar a Malha Tubular, a Atadura de Algodão Ortopédico, imergir a Atadura Gessada em água, à temperatura ambiente, durante 3 segundos. Retirar o excesso de água apertando suavemente pelas extremidades. Aplicar sobre a Atadura de Algodão moldando o aparelho. PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS O USO.

Precauções: Períodos maiores de imersão provocam aumento do tempo de secagem e redução da resistência do aparelho gessado. Não adicionar nenhum ingrediente químico na água. A Atadura Gessada não deve ser torcida.

Transporte e armazenagem: Transportar sem atrito. Manter em lugar seco e limpo, ao abrigo da luz.

Validade: Enquanto a embalagem for mantida intacta e armazenada em local adequado, é válido por 3 anos, a partir da data de fabricação.

Apresentação: largura de 4 a 50 cm e comprimento de 0,5 a 10 m.

Registro Anvisa: 80205290003.

ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**AFE Cadastro Nº 8.02052-9 (K27474XW1180)**

Rua Ortofen, 02 a 08 – Jardim Brasil – Porto Feliz-SP

CEP: 18540-000 – CNPJ: 04.890.798/0001-45

Industria Brasileira

Atendimento ao Consumidor: (15) 3262.5549 / 3262.5589 – Site: www.ortofen.com.br**Responsável Técnico:** Luciane Viapiana Padilha – CRF/SP: 29.345