

Especificação Técnica

COLETOR DE SECREÇÃO 500ML 3P MEDICAL



1. Informações Gerais:

Descrição do Produto: COLETOR DE SECREÇÃO 500ML.

Apresentação: 500 mL

Composição: Frasco em PVC (cloreto de polivinila) transparente, tampa em polipropileno, alça para transporte, extensões vácuo (cinza) e paciente, providas de conectores graduados, anel de vedação, podendo conter acessórios como clamp regulável, obturador, válvula anti-refluxo, capa para não visualização da secreção, conector 1/4, espiral e suporte em polipropileno.

Indicação: Indicado para coletar secreções em aspiração cirúrgica ou vias aéreas superiores.

Instruções de Uso: Examine o produto antes de utilizá-lo. Conecte a extremidade da extensão vácuo (cinza) à rede de vácuo. Conecte a extremidade da extensão do paciente a sonda, cânula ou cateter de aspiração. Proceda à aspiração. Troque o frasco quando necessário. Troca do frasco: feche o clamp regulável. Desconecte a extremidade da extensão do paciente. Tampe a extremidade com o obturador. Remova o conector da rede de vácuo. Descarte o produto em local apropriado.

Precauções: Não utilizar caso o produto esteja danificado. Verificar se a integridade da embalagem está perfeita. Não utilizar caso a embalagem e/ou rótulo estiverem danificados. Produto de uso único. Produto descartável. Destruir após o uso. Não reutilizar ou reprocessar. Este produto só pode ser utilizado por profissionais qualificados. A 3P MEDICAL não se responsabilizará por danos causados pela utilização imprópria do produto.

Armazenamento e Transporte: Armazenar e transportar em local seguro, ao abrigo de calor e umidade excessivos.

Esterilização: Não estéril. **Validade:** 2 anos.

2. Informações Regulatórias:

Código: 11603

Registro M.S. / ANVISA: 81659440013

Classificação ANVISA: Classe I

NCM: 90183929

Código de Barras Produto: 7898653020352

Código de Barras Caixa: 17898653020359



3. Especificações:

Conteúdo: 1 unidade

Embalagem de Embarque: Caixa de papelão (C: 50cm X L:35cm X A:26cm)

Quantidade por Caixa: 20 unidades

Peso/ Caixa: 4,68Kg

Empilhamento Máximo: 8 caixas

Responsável: LUCIANA BARROS DE FIGUEIREDO

Revisão: 18/12/2023