

Especificação Técnica

COLETOR DE SECREÇÃO 3500ML 3P MEDICAL



1. Informações Gerais:

Descrição do Produto: COLETOR DE SECREÇÃO 3P MEDICAL 3500ML.

Apresentação: Embalagem individual em polietileno atóxico e transparente com as instruções de uso.

Composição: Frasco de PVC (cloreto de polivinila) transparente, atóxico, com escala graduada e capacidade de 3.500ml, alça em PVC (cloreto de polivinila), tampa em polipropileno; extensões em PVC (cloreto de polivinila) atóxico (cinza: "vácuo"); conectores graduados em PVC (cloreto de polivinila); clamp regulável em polipropileno; obturador em polipropileno, válvula anti-refluxo em polietileno, anel de vedação em polietileno, capa protetora em polietileno, conector ¼ em polipropileno, espiral em PVC (cloreto de polivinila) e suporte em polipropileno.

Indicação: USO MÉDICO HOSPITALAR. DESCARTÁVEL. Indicado para coletar secreções em aspiração cirúrgica ou vias aéreas superiores.

Instruções de Uso: Abrir a embalagem utilizando técnicas usuais de assepsia; A extremidade da extensão do paciente conecta a sonda, cânula ou cateter de aspiração e a extremidade da extensão vácuo (cinza) conecta a rede de vácuo. Proceda à aspiração. Troque o frasco quando necessário. Troca do frasco: feche o clamp regulável. Desconecte a extremidade da extensão do paciente. Tampe a extremidade com o obturador. Remova o conector da linha de vácuo. Descarte o produto em local apropriado.

Precauções: Observar atentamente as instruções de uso. Não utilizar caso o produto esteja danificado. Verificar se a embalagem está perfeita (não utilizar caso a embalagem de proteção e/ou rótulo estiverem danificados). Não utilizar após a data de validade (indicada no rótulo da embalagem). Abrir a embalagem somente no momento do uso através de técnica asséptica adequada. Artigo médico-hospitalar. Este produto só pode ser utilizado por profissionais qualificados. Descartar após o uso em local apropriado. A 3p medical não se responsabiliza por danos causados pela utilização imprópria do produto.

Armazenamento e Transporte: Armazenar o produto em local limpo, seguro, evitando exposição ao sol, umidade e temperatura elevada. Transportar o produto em local limpo, seguro, evitando exposição ao sol, umidade e temperatura elevada.

Esterilização: Não estéril.

Validade: 2 anos.



2. Informações Regulatórias:

Código: 11619

Registro M.S. / ANVISA: 81659440013

Classificação ANVISA: Classe I

NCM: 90183929

Código de Barras Produto: 7898653020475

Código de Barras Caixa: 17898653020472

3. Especificações:

Conteúdo: 1 unidades

Embalagem de Embarque: Caixa de papelão (C:55,5cm X L:43cm X A:45cm)

Quantidade por Caixa: 10 unidades

Peso/ Caixa: 6,4kg

Empilhamento Máximo: 8 caixas

Responsável: LUCIANA BARROS DE FIGUEIREDO

Revisão: 18/12/2023