



## Ficha Técnica

### Coletor de Urina Sistema Fechado - GLOMED

REG. Nº.: 220  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

**NOME TÉCNICO:** BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO PARA DRENAGEM URINÁRIA - GLOMED

**NOME COMERCIAL:** COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO- GLOMED

**REGISTRO ANVISA:**

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO : **80273450019**

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO : **80273450020**



**IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:**

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**

**HUNAN PINGAN MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD**

Number 8, Industrial Road ,Economic Development Zone, Li county, Hunan Province, China

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:**

Composto de um tubo de PVC ligado a bolsa coletora de PVC graduada, com capacidade de 500 a 2000ml e válvula antirrefluxo de PVC na parte inferior, dependendo do modelo pode apresentar configurações diferentes. Segue especificações:

**MODELOS DISPONÍVEIS:**

PRODUTO	COD. INTERNO	PESO	LARG	ALT	COM	CAIXA TRANSPORTE	COD. DE BARRAS CX. DE EMBARQUE	COD. DE BARRAS EMBALAGEM
Coletor s/ filtro	-	10,1	0,36	0,34	0,55	100	0606529140571	0606529140588
Coletor c/ filtro	-	10,1	0,36	0,34	0,55	100	0606529140595	0606529140601

Rua Ricardo Georg nº1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC

Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - [olimed@olimed.com.br](mailto:olimed@olimed.com.br) - [www.olimed.com.br](http://www.olimed.com.br)

CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366


## Ficha Técnica

### Coletor de Urina Sistema Fechado - GLOMED

REG. Nº.: 220  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138


#### IMAGEM GRÁFICA:

- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO

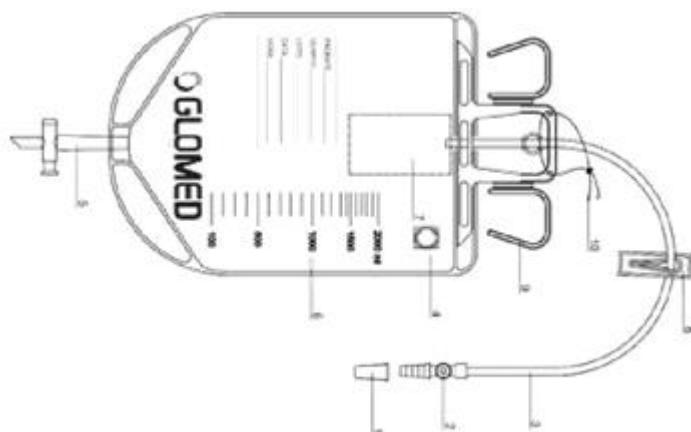

Capacidade de 2.000ml com escalas de graduação. Composto por: 1- Tampa protetora; 2 – Ponto de coleta de amostra; 3 – Tubo extensor; 4 - Filtro; 5 - Tubo de drenagem com válvula; 6 – Escala de graduação; 7 - Válvula antirrefluxo; 8 – Clamp; 9 - Alça dupla; 10 – Cordão/Cadarço para locomoção.

- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO

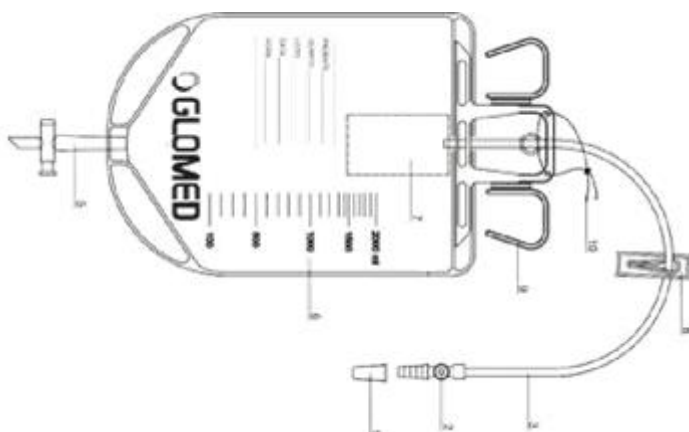

Capacidade de 2.000ml com escalas de graduação. Composto por: 1- Tampa protetora; 2 – Ponto de coleta de amostra; 3 – Tubo extensor; 5 - Tubo de drenagem com válvula; 6 – Escala de graduação; 7 - Válvula antirrefluxo; 8 – Clamp; 9 - Alça dupla; 10 – Cordão/Cadarço para locomoção.

#### INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Os coletores de urina da marca GLOMED são indicados para drenagem, coleta e mensuração de diurese em pacientes submetidos à sondagem vesical de demora ou de alívio. Geralmente estes pacientes encontram-se em situações cirúrgicas, de retenção urinária, baixa mobilidade ou apenas necessidade de controle hídrico diário. Reduzindo o risco de contaminação através de seu sistema fechado.



## **Ficha Técnica** **Coletor de Urina Sistema** **Fechado - GLOMED**

REG. Nº.: 220  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

### **EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:**

Embalado individualmente em envelope de polietileno/Poliamida (PE/PA) e papel grau cirúrgico, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa de transporte 100unidades.

**ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

### **ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Feche a válvula de saída da bolsa coletora;
- Remova a tampa de proteção do conector adaptador e introduza ao cateter previamente preparado;
- A urina fluirá para dentro da bolsa através do cateter urinário;
- Para esvaziar a bolsa, retirar o tubo de drenagem do encaixe e posicione a um recipiente adequado que receberá a urina, em seguida abra a saída da válvula para drenagem;
- Após o esvaziamento, fechar a válvula e recolocar no encaixe.

### **PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

### **CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

SIMARA COLOMBI BUSCH  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138