



## **BIOEXTENSOR PARA CATETER NASAL ESTÉRIL**

### **1. NOME DO PRODUTO:**

Bioextensor para Cateter Nasal Estéril.

### **2. MARCA:**

Biobase.

### **3. FABRICANTE:**

Biobase Indústria e Comércio Ltda.  
Rua dos Oitis, Nº 80 – Distrito Industrial  
CEP: 37.556 – 836  
Pouso Alegre/MG.  
Fone/Fax: (35) 3427-7000  
CNPJ: 05.216.859/0001-56

### **4. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:**

Produto registrado na ANVISA sob nº 80212349014.

### **5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO:**

Artigo médico-hospitalar, livre de látex e estéril, que tem como função aumentar a área de movimentação do paciente nas aplicações de oxigênio, devido ser uma extensão ao cateter nasal.

#### **BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



## **BIOEXTENSOR PARA CATETER NASAL ESTÉRIL**

É um tubo de PVC com um conector em cada uma das extremidades, o qual deve ser encaixado na fonte de oxigênio permitindo maior mobilidade enquanto do uso de oxigenoterapia. A outra extremidade deve ser conectada ao cateter nasal.

Disponíveis nos tamanhos entre 1 e 50 metros, com intervalo de 1 metro cada modelo.

O produto é apresentado em:

- Embalagem primária em *pouche* de papel grau cirúrgico e filme de PVC ou em polietileno. A embalagem é única e individual na forma estéril, pronto para utilização.
- Embalagem secundária em papelão onda dupla, com capacidade para quantidades entre 5 e 2.000 unidades.

### **6. PRAZO DE VALIDADE:**

04 (cinco) anos a partir da data de esterilização.

### **7. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:**

Óxido de etileno, radiação gama ou feixe de elétrons.

### **8. COMPONENTES DO PRODUTO:**

- Tubo em PVC atóxico cristal calibre 16fr;
- Conector em PVC atóxico verde ou transparente.

### **9. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO E CONTROLE:**

#### **BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



## **BIOEXTENSOR PARA CATETER NASAL ESTÉRIL**

- Observe o aspecto geral da embalagem. Caso encontrar-se danificada, não utilize o produto;
- Observe o prazo de validade do produto. Caso encontrar-se vencido, não utilize o produto;
- Abra a embalagem assepticamente;
- Faça as conexões da extensão ao cateter nasal e a fonte de oxigênio;
- Coloque o cateter nasal no paciente, conforme instruções do mesmo;
- A utilização deve ser realizada por pessoal qualificado, como médicos e/ou enfermeiros;
- Após a administração, descarte o produto de acordo com as normas de destino de materiais hospitalares.

### **10. EFEITOS COLATERAIS:**

O produto não apresenta efeitos colaterais, desde que utilizado corretamente de acordo com a finalidade de seu uso.

### **11. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:**

Conservar o produto em local limpo, seco e ao abrigo da luz solar e entre temperatura de 15 a 35°C.

O empilhamento máximo deve ser de 10 caixas.

### **12. PRECAUÇÕES:**

Artigo médico-hospitalar. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada e/ou o prazo de validade vencido.

#### **BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



### **BIOEXTENSOR PARA CATETER NASAL ESTÉRIL**

No transporte e manuseio, devem ser tomadas precauções para que não ocorram danos à embalagem e ao produto.

#### **13. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC):**

Informações, dúvidas, críticas e/ou sugestões; entrar em contato com o SAC Biobase:

Fone/Fax: (35) 3427-7029

E-mail: [qualidade2@biobase.ind.br](mailto:qualidade2@biobase.ind.br)

#### **14. FOTOS DO PRODUTO:**



#### **BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000