



ENZIMOX 4 EP

DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO.

ENZIMOX 4 EP é um detergente multienzimático especializado na limpeza de todo instrumental cirúrgico e matérias médicos hospitalares.

CARACTERÍSTICAS

ENZIMOX 4 EP é um detergente neutro multienzimático de alta eficiência à base de 6 enzimas. Desenvolvido para máxima limpeza de endoscópios, fibroscópios flexíveis, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos, materiais de anestesia, pisos e vidrarias, agindo por contato sem danificar nenhum componente destes instrumentos. Pode ser usado em equipamentos automatizados, lavadoras por ultrassom, lavadoras descontaminadoras e manualmente.

COMPOSIÇÃO :

Ingredientes Ativos: Soluções de 4 enzimas,

Protease, Amilase, Carbohidrase, Lipase

Composição : Copolímero 6200, Metaborato de sódio, Cloreto de Cálcio, Solvente , Conservante, Controlador de Espuma, Corante , Água , SOLUÇÃO NÃO IONICA .

MODO DE USAR

Manual / Ultrassônica

1 - Fazer uma solução de 1 mL de **ENZIMOX 4 EP** para cada litro de água.

ICARAÍ DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP

Escritório Central
Rua Luiz Nallin - Vila Cosmos
CEP: 13150-000 - Cosmópolis / SP

Fábrica
Rua Rondônia, 03 - Portal da Estância
CEP: 37590-000 - Jacutinga / MG

Fone: 19 3872-3033
sac@icaraidobrasil.com
www.icaraidobrasil.com



Tabela Para Diluição Enzimox 4 EP

Quantidade de Água (Litros)	Manual – quantidade de Enzimox 4 EP (ml)	Automática quantidade de Enzimox 4 EP (ml)
1	1	1
3	3	3
5	5	5
10	10	10
15	15	15
20	20	20
25	25	25

- 2 - Imergir o instrumental nesta solução, deixando-o por no mínimo 5 minutos.
- 3 - Exponha as áreas críticas de cada instrumental: lumens, articulações, ranhuras, desmonte o artigo se necessário (mergulhe completamente os endoscópios, fibroscópios, cateteres tendo o cuidado para que a solução atinja todos os canais e mantenha no mínimo 5 minutos, após este período aspire e ejete a solução pelos canais). Em materiais com o sangue muito ressecado mantenha por mais tempo.
- 4 - Enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos de ENZIMOX 4 EP processo de desinfecção recomendado pelo fabricante
- 5 - Deixe escorrer e seque minunciosamente, eliminando completamente a água. Execute o processo de desinfecção recomendado pelo Ministério da Saúde. Substitua a solução a cada 12 horas, ou antes, se estiver saturada (solução que não comporta quantidades adicionais de matérias orgânicas).

ICARAÍ DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP

Escritório Central
Rua Luiz Nallin - Vila Cosmos
CEP: 13150-000 - Cosmópolis / SP

Fábrica
Rua Rondônia, 03 - Portal da Estância
CEP: 37590-000 - Jacutinga / MG

Fone: 19 3872-3033
sac@icaraidobrasil.com
www.icaraidobrasil.com



DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros Solução Especificação pH Pronto uso 6,0 a 8,0 Densidade Concentrada
EMBALAGENS/RENDIMENTOS Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro (Rendimento: 1L produto = 1.000L solução) Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros (Rendimento: 5L produto = 5.000L solução) Entrada 1,020 a 1,050 g/mL Aparência Concentrado Líquido AZUL dor Concentrado Lavanda

SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's. O contato direto e/ou prolongado pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Em caso de irritação lave o local com água em abundância, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800148110.

RESTRIÇÕES DE USO

Em artigos de látex ou outros componentes de origem natural é indicado não exercer o tempo de imersão recomendado. Não misturar o ENZIMOX 4 EP a outros produtos químicos como, por exemplo, desinfetantes (glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido peracético, etc.), esses produtos podem degradar a ação das enzimas prejudicando seu desempenho.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade. TRANSPORTE O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos que saem da ICARAI DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA estarão sempre portando laudos de qualidade físico-químicos. ENZIMOX 4 EP possui laudos de corrosividade, atividade enzimática, laudos de irritação dérmica e ocular, laudo de biodegradabilidade e autorização da ANVISA.

ICARAI DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP

Escritório Central
Rua Luiz Nallin - Vila Cosmos
CEP: 13150-000 - Cosmópolis / SP

Fábrica
Rua Rondônia, 03 - Portal da Estância
CEP: 37590-000 - Jacutinga / MG

Fone: 19 3872-3033
sac@icaraidobrasil.com
www.icaraidobrasil.com



LEGISLAÇÃO - Produto risco II PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº 365600008

Categoria: - Detergente Enzimático: RDC Nº 55, 14 de novembro de 2012.

Informações de rótulos: RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008. RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.

PRAZO DE VALIDADE

24 MESES

APRESENTAÇÃO

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro

Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros.

ICARAÍ DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA - EPP

Escritório Central

Rua Luiz Nallin - Vila Cosmos
CEP: 13150-000 - Cosmópolis / SP

Fábrica

Rua Rondônia, 03 - Portal da Estância
CEP: 37590-000 - Jacutinga / MG

Fone: 19 3872-3033

sac@icaraidobrasil.com
www.icaraidobrasil.com