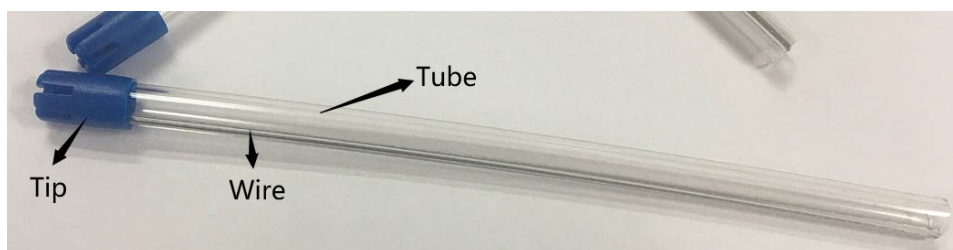

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO

SUGADOR DE SALIVA*Suctor de Saliva***1. Instruções do Produto:**

O Sugador de saliva é utilizado para absorver a saliva e outros objetos estranhos da boca do paciente, evitando ao mesmo tempo a infecção cruzada entre os pacientes.

Nossos produtos, realizados com padrão empresarial, possuem características de maciez, solidez, não sendo inclusive irritantes para a pele. Temos diversos tipos de produtos, também tipos especiais são produzidos para atender às necessidades de nossos clientes.

2. Componente / peça do produto e matérias-primas:

Componente / peça do produto: Tip (ponta), Tube (Tubo) e Wire (Fio).

Matérias-Primas:

Ponta: PVC

Tubo: PVC

Fio: Aço Inoxidável (ASTM410)

3. Finalidade de uso:

Utilizado para absorver a saliva e outros objetos estranhos da boca do paciente, enquanto previne a infecção cruzada entre os pacientes.

4. Contraindicações, precauções, advertências, efeitos adversos:

a. Deve ser utilizado dentro do prazo de validade especificado, e a embalagem deve estar bem fechada e não danificada;



- b. Produtos úmidos ou mofados não podem ser utilizados.
- c. Não reutilizável. Pode ser usado somente uma vez e não pode ser reutilizado, para evitar infecções cruzadas.
- d. Não use se a embalagem estiver danificada.
- e. Armazenar em local bem ventilado, livre de ar corrosivo, em temperatura entre $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$, umidade $\leq 80\%$.
- f. Sem efeitos adversos.

5. Método de uso :

- a. De acordo com os aparelhos de sucção, escolha um tamanho adequado para uso médico.
- b. Abra a embalagem, retire o Sugador de saliva e estará pronto para uso.

Fabricante: Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite E2014, 2nd Floor, No.3558, Zhenbei Rd., Putuo District, 200062 Shanghai, China	Detentor da Notificação: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Rua Adolfo Mantovani – 232, Residencial Flórida - Ribeirão Preto/SP – CEP: 14026-295 CNPJ: 07.788.510/0001-14 Telefone/SAC: (16) 2138-8080 Notificação ANVISA nº: 80327080001
---	---