

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



**DESCRIÇÃO:** Poltrona Reclinável

**MODELO:** RC 12.050

**ANVISA:** 80316080013

### **R.C.- MÓVEIS LTDA**

Av. Moisés Forti, 1.230 - Distrito Industrial

CEP: 13368-100 - Capivari - SP

CNPJ 02.377.937/0001-06 - Indústria Brasileira

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
(19) 2119-9000 [sac@rcmoveis.com.br](mailto:sac@rcmoveis.com.br)

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Eng. Rodrigo Deolindo Corrêa  
CREA/SP: 5061940363/D  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
José Ricardo Corrêa

## APRESENTAÇÃO



A empresa RC Móveis Hospitalares oferece a você produtos com qualidade e Durabilidade. E tê-lo como cliente e usuário de um de nossos produtos é um prazer e uma satisfação. E é pensando em nossos clientes que oferecemos produtos com tecnologia, conforto e que atendem as necessidades de nosso exigente mercado. Este manual tem o objetivo de descrever as características técnicas e operacionais das Poltrona Hospitalares fabricadas pela RC Móveis Hospitalares, podendo assim o usuário conhecer e desfrutar melhor destes produtos.

O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário.



Informações úteis para o usuário.

**Vendas - Distribuição - Assistência Técnica**

**R.C.- MÓVEIS LTDA**

Av. Moisés Forti, 1.230 - Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco

CEP: 13368-100 - Capivari - SP

(19) 2119-9000

rcmoveis@rcmoveis.com.br

www.rcmoveis.com.br

A **R.C** Móveis Hospitalares como fabricante se responsabiliza pelas características técnicas do produto.

As manutenções, reparos e alterações que se façam necessários efetuar no produto devem ser realizadas pelo fabricante ou representante autorizado.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**R.C 12.050**

### Poltrona Hospitalar Reclinável



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Estrutura:** Confeccionada em tubo de aço carbono de 25 x 25 x 1,20 mm, com braços articuláveis ao encosto e pés em tubo de aço carbono de 50 x 30 x 1,20 mm com ponteiros de borracha.

**Movimentos:** Costas e pés reclináveis simultaneamente em 04 posições, através de sistema mecânico, com retorno através de mola.


**Estofado:** Confeccionado em espuma de 8 cm D 28, revestido em courvim.

**Acabamento:** Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.  
Opcionais: Encosto sem Botões e Braços Fixos.

**Dimensões:** Normal: 0,95 x 0,80 x 0,50 (C x L x A). Reclinada: 1,71 x 0,80 x 0,50 (C x L x A).

**Capacidade:** 150


## PARTES DO PRODUTO

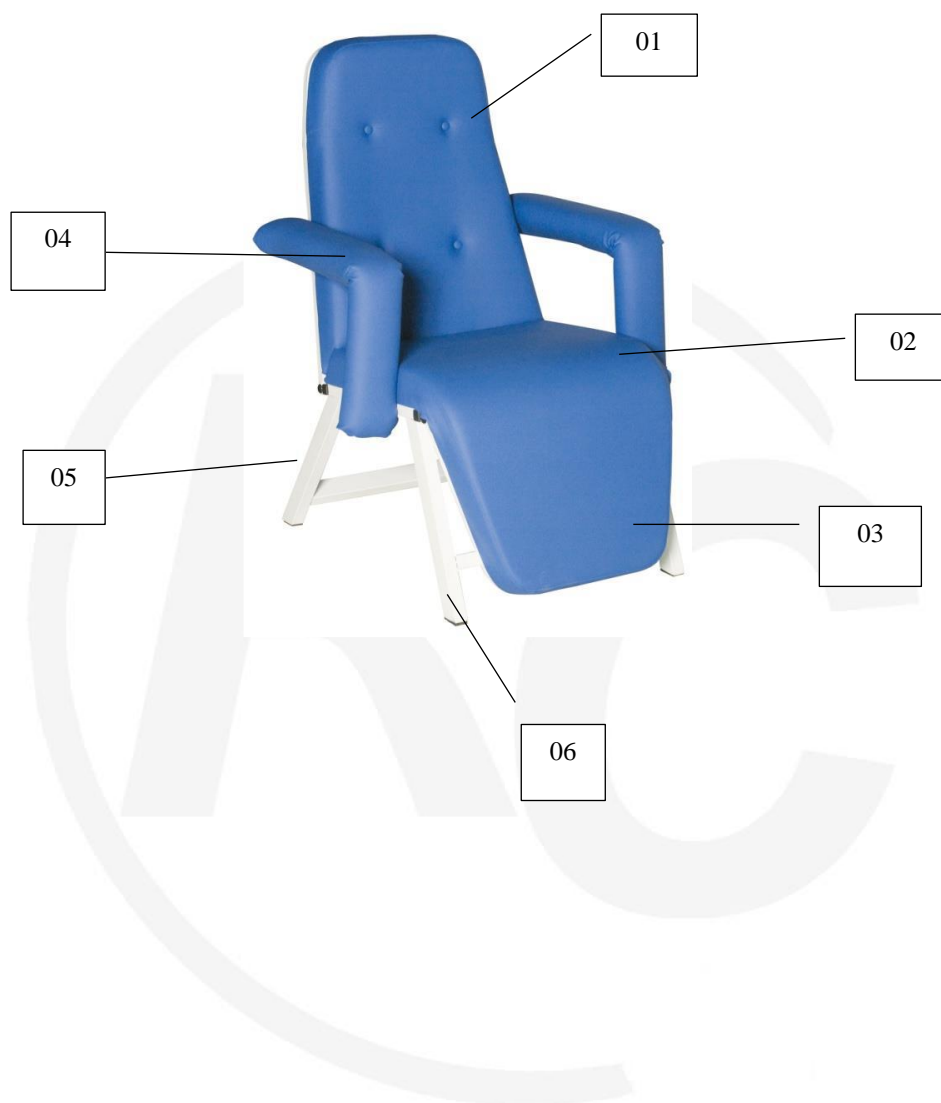

### INDICE:

1. Encosto Dorso (Reclinável através de acionamento em alavanca lateral, podendo ser simultâneo, ou, independente da peseira).
2. Assento
3. Peseira (Reclinável através de acionamento em alavanca lateral, podendo ser simultâneo, ou, independente do Dorso).
4. Braço Lateral Articulável simultâneo ao dorso.
5. Alavanca de acionamento dos movimentos do encosto Dorso e apoio dos Pés, por cremalheiras (Opcional por mola a gás).
6. Pés (Opcional com rodízios)

## Simbologias

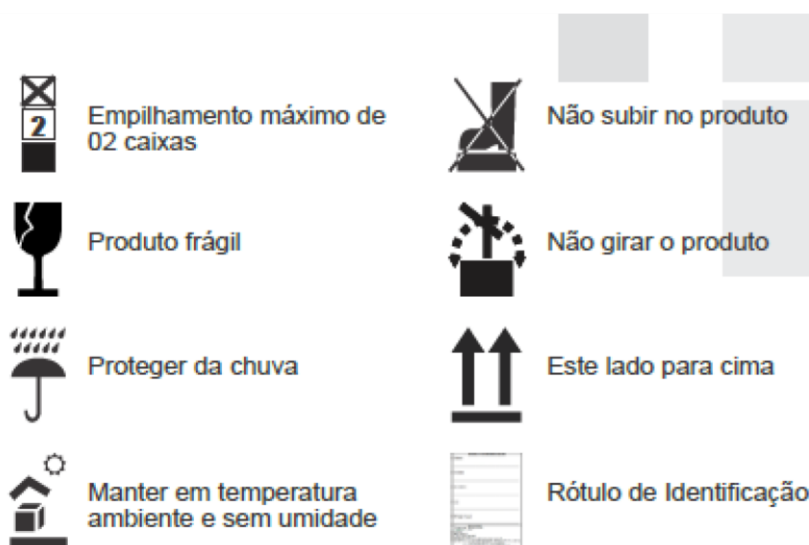

## INSTRUÇÕES DE USO

### CONTROLES DE ACIONAMENTO

- Para acionar os movimentos reclináveis da poltrona, pressione para baixo a alavanca lateral de acionamento da cremalheira, ou pistão a gás, force a para trás o dorso até atingir a posição desejada, depois solte a alavanca.
- Para voltar a posição sentado, basta pressionar a alavanca, deixando livremente o encosto do dorso, que o mesmo voltará automaticamente a posição desejada.

### ATENÇÃO:

⚠ Sempre verificar o travamento dos rodízios quando a poltrona estiver com pacientes, para os modelos que contenham rodízios.

### CUIDADO:

- Para maior durabilidade e garantia do produto, evite movimentos desnecessários.
- A utilização em desacordo com essas orientações é de inteira responsabilidade do usuário.
- Não permita que crianças operem o produto.

### INSTALAÇÃO:

Para instalação do produto não é necessário técnico especializado, só retirar o produto da embalagem original e colocar em uso.

**RODÍZIOS E FREIOS:** Ativação e desativação dos freios, no rodízio (modelos com rodízio):



#### FREIOS DESATIVADOS

Pressione aqui para acionar



#### FREIOS ACIONADOS

pressione aqui para desativar



#### INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

As Poltronas Hospitalares / Cadeiras para Doador, são equipamentos indicados para:

- Repouso/Recuperação de Pacientes.
- Repouso de Acompanhantes.
- Procedimento de Soroterapia / Quimioterapia / Radioterapia / Hemodiálise / Coleta de Sangue / Amamentação / Lactante.
- Outros procedimentos ambulatoriais.

#### LIMPEZA E DESINFECÇÃO:

Fazer a limpeza usando sempre um pano macio umedecido com água, ou uma esponja de nylon fina, e retire o excesso com outro pano macio limpo.

Para desinfecção e esterilização use Produtos Adequados à Norma Hospitalar.

#### Cuidado!!!

- ✓ Não utilize produtos à base de cloro, (Cloreto de Sódio (NaCl), Hipoclorito de Sódio (NaClO) ou que libere ácido peracético, por se tratarem de agentes oxidantes.
- ✓ Não utilize produtos abrasivos como esponja de aço por exemplo, pois ela deixará resíduos sobre a superfície dos materiais, comprometendo a resistência à corrosão.
- ✓ Nunca utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou os estofados.
- ✓ Não utilizar álcool a 70% sobre superfícies acrílicas ou emborrachadas.

A empresa RC Móveis Hospitalares não se responsabiliza pela utilização de preparados cujos componentes diferem das indicações apresentadas.

#### **ALERTA AO USUÁRIO:**

*O uso ou substituição de qualquer parte, acessório ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário.*

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO:**

Em temperatura ambiente. Não exponha diretamente ao sol, nem a umidade.

#### **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO:**

Poltronas hospitalares / Cadeira para Doador, como qualquer outro equipamento de uso hospitalar possui uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio. Importante é saber utilizá-la da melhor maneira possível respeitando seus limites.

- ✓ Recomenda-se que seja feita manutenção preventiva a cada 12 meses.
- ✓ A empresa RC Móveis prestará assistência técnica, efetuando troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e opcionais que apresentem defeito de fabricação, mediante solicitação do cliente, dentro do período da garantia e após a garantia mediante aprovação do pedido.
- ✓ Verifique periodicamente ou sempre que necessárias folgas em parafusos e porcas, providenciando o reaperto.
- ✓ Evite deslocamentos diretos de níveis acima do diâmetro do rodízio.
- ✓ Respeite o limite de capacidade.

#### **MANUTENÇÃO CORRETIVA:**

O Fabricante prestará assistência técnica, efetuando troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e opcionais que apresentem defeito de fabricação, mediante solicitação do comprador e após, aprovação do pedido.

Em caso de algum problema, entrar em contato com:

**R.C. - Móveis Ltda**

**CNPJ.: 02.377.937/0001-06**

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco – Capivari – SP CEP 13.368-100

Fone/Fax: (19) 2119-9000 / Fax: (19) 2119-9005

E-mail: [sac@rcmoveis.com.br](mailto:sac@rcmoveis.com.br) - Site: [www.rcmoveis.com.br](http://www.rcmoveis.com.br)

**Responsável Técnico**  
**Rodrigo Deolindo Corrêa**  
Crea/SP: 5061940363

**Responsável Legal**  
**José Ricardo Corrêa**  
Diretor

**Equipamento de Fabricação Nacional**  
**Fabricante: R.C.- Móveis Ltda**