



Winner Indústria de Descartáveis Ltda.
Ficha Técnica

AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL WINNER

REGISTRO ANVISA: 80201960184

CÓDIGO DO PRODUTO: 2051 – Tamanho 135X170cm

COMPOSIÇÃO:

O Avental/Capote Cirúrgico Estéril Descartável Winner é fabricado em SMS com gramatura 50 g/m², atóxico, 100% polipropileno, isento de látex, manga longa, punho em malha, com tiras de amarração externas e internas para fechamento por transpasse na altura da cintura e do pescoço, com cartão de transferência e toalha para as mãos. Disponível na cor: azul.

VALIDADE:

5 anos a partir da data de fabricação.

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO:

O Avental/Capote Cirúrgico Estéril Descartável Winner é indicado para procedimentos clínico-cirúrgicos, sendo feito para proteger os usuários de possíveis contaminações dentro das dependências hospitalares onde se faz necessária uma maior proteção contra água (hidro-repelente) e sangue (hemo-repelente).

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

- Produto de uso externo;
- Produto de uso único;
- Modelagem unissex;
- O produto é apirogênico, isento de látex não oferecendo, em geral, risco ao usuário;
- Conservar em local fresco e seco, ao abrigo de poeiras e umidade;
- Não utilizar o produto caso sua embalagem original apresente sinais de violação ou data de validade expirada;
- Observar atentamente as instruções de uso;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Descartar após o uso em local apropriado;
- Suspender o uso no caso de alergia ao polipropileno.

EFEITOS ADVERSOS:

Não são relatados efeitos adversos ao uso deste produto.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

O produto apresenta-se com embalagem primária contendo 1 unidade embalada em papel grau cirúrgico. E embalagem secundária de 10 a 100 unidades acondicionadas em caixa de papelão, devidamente identificado e com todas as informações necessárias para seu uso. Apresenta-se com tamanhos e gramaturas variadas.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Observar a integridade da embalagem e as informações contidas na mesma;
2. Escolher o tamanho adequado do avental conforme as medidas do corpo do usuário;
3. Abrir a embalagem usando técnicas assépticas e retirar o avental da embalagem suspendendo-o;
4. Segurar o avental pela parte interna e introduzir o braço pela manga que está exposta e em seguida introduzir o outro braço;
5. Adaptar ao corpo de modo confortável, cobrindo totalmente a roupa e evitando contato com a parte externa do avental;
6. Fechar o avental com auxílio das tiras;
7. Executar o procedimento;
8. Retirar o avental usando técnicas assépticas, desamarrando/rompendo as tiras, em seguida retirados os braços no sentido contrário ao posicionamento das mangas e finalizar a retirada evitando o contato com a parte externa;
9. Descartar em local apropriado;
10. Não reutilizar após o seu uso.

FABRICANTE:

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA

CNPJ: 05.421.585/0001-37

Rua Macaúba, Lote 01 – Águas Claras

Brasília – DF CEP: 71928-180

TEL: (61) 3435-6750 / 3435-6754