


### Cateter Irrigador

Registro ANVISA nº: 80984190048

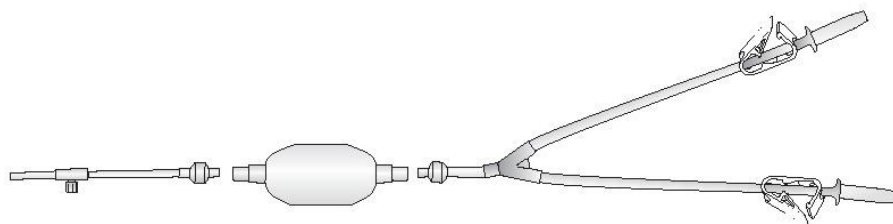

### Modelos comerciais:

165111	Irrigador com sistema de irrigação em Y
165121	Irrigador com sistema manual de pressão

**Introdução:** As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

**Indicação de Uso:** O Cateter Irrigador é utilizado para fornecer irrigação contínua e com volume durante cirurgias endoscópicas.

**Princípio de funcionamento:** O Cateter Irrigador é utilizado para irrigação manual controlada, tendo como princípio de funcionamento uma ação pulsátil e fluxo contínuo liberando o volume de irrigação com precisão. Possui dupla entrada para frascos de soluções fisiológicas independentes

**Modo de Uso do Produto:** Leia as instruções de uso do fabricante antes de utilizar o produto.

O Cateter Irrigador é um produto médico estéril e atóxico, utilizado da seguinte maneira:

1. Furar em condições assépticas o frasco contendo a solução de irrigação.
2. Ajustar o fluxo da solução de irrigação, conforme necessário.
3. Conectar o adaptador luer lock na entrada de irrigação do endoscópico.
4. Comprimir a bomba para irrigação como e quando necessário. A bomba se encherá novamente automaticamente.

### Advertências e Precauções:

- Produto médico somente para uso profissional.
- Produto médico estéril a menos que a embalagem esteja danificada ou tenha sido aberta.
- Ler as instruções de uso cuidadosamente. Falhas no atendimento às instruções de uso, precauções e cuidados especiais com o uso do produto médico podem conduzir a sérias consequências ou danos para o paciente

**Contraindicações:** Não se aplica.

**Condições de Armazenamento e transporte:** Armazenar e transportar em temperatura  $25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$  e umidade de 30% a 80%

### Apresentação comercial:

O Cateter Irrigador está disponível em embalagem primária de Policloreto de Vinila (PVC) mais papel grau cirúrgico contendo 1 unidade do produto. Posteriormente é acondicionado em caixa de papelão (celulose), contendo 1 unidade do produto.

**Método de esterilização:** Óxido de Etileno.

**Descarte do produto:** A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

**Importado e distribuído por:**

Gadali Medical Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA  
Endereço: Rua Eleutério Rodrigues, 434, Campinas-SP- CEP 13.073-066  
Resp. Técnica: Dalize Maria Squebola Cola Coren: 140152136

**Fabricado por:**

Plastik Medikal Urunler San. Ve Tic. Ltd. Sti  
Endereço: Deri OSB Mahallesi Yan Sanayi Cad Nº: 13 TUZLA-  
ISTANBUL - Turquia