



### **Instruções de Uso – Kit Duplo J com Fio Guia Hidrofílico**

#### **Indicação de Uso:**

Os Cateteres Duplo J são indicados para a drenagem interna temporária da junção uteropélvica com a bexiga. Os Duplos J podem ser utilizados nas seguintes cirurgias: remoção de cálculos, tumores no ureter e rim. Reparação de cicatrizes e estenoses no ureter e remoção de tumores ao redor do ureter. NOTA: O tempo máximo de permanência do cateter no paciente é de até 30 dias.

Fio Guia: O fio guia é projetado para dirigir um cateter até o local desejado anatomicamente durante procedimentos diagnósticos ou de intervenção.

#### **Modo de Uso:**

1. Retire o fio guia e o suporte da embalagem;
2. Encha o suporte com solução salina fisiológica heparina zed através do centro do suporte utilizando uma seringa;
3. Remova o fio guia do suporte e o inspecione antes do uso para verificar sua lubrificação. Se o fio guia não puder ser facilmente removido do suporte, injete mais solução salina fisiológica heparina zed no suporte e tente novamente;
4. Antes do uso, prepare o cateter com solução salina fisiológica heparina zed para garantir o movimento suave do fio guia dentro dele;
5. O fio guia pode escorregar totalmente para dentro do cateter ou para fora dele devido a sua baixa fricção ao contato;
6. Mantenha pelo menos 5 cm do fio estendido para fora do centro do cateter durante a introdução.

#### **Retirada do Cateter:**

Uma corda amarrada ao cateter (pusher) vinda de sua passagem urinária e colado na pele por perto é utilizada para retirada do cateter. O seu cirurgião irá informar o paciente após a cirurgia. Este procedimento poderá ser realizado em consultório depois de 7 dias de sua colocação, sem a necessidade de nova cirurgia. Você será informado quando ele poderá ser retirado. Se você acidentalmente desalojar o cateter, você vai notar uma incontinência de urina constantemente. Se isso ocorrer, você pode remover com segurança o cateter, puxando a corda.

Obs.: O Cateter ureteral Duplo J não deve permanecer no paciente em um período superior a 30 dias.

**Advertências:**

Produto de reprocessamento proibido.

Esterilizado por gás de Óxido de Etileno. Não reesterilizar ou reutilizar.

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA.

**Precauções:**

Produto para uso Médico Hospitalar deve ser manuseado e utilizado somente por profissionais devidamente habilitados.

**Contraindicações:**

O produto é contraindicado para pacientes inadequados para cateterização. O médico responsável pelo procedimento deverá avaliar a possibilidade de quaisquer contraindicações para utilização do produto, decorrentes de outros problemas apresentados pelo paciente, e decidir a providência a ser adotada.

**Condições de Transporte e armazenamento:**

Armazenar e transportar em local limpo e seco, à temperatura ambiente controlada.

Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original fechada, assegurando a preservação de sua integridade, protegido de intempéries, até o momento do uso.

O produto não contamina o ambiente, uma vez que pode ser reciclado. No entanto, após o uso, deve ser descartadas por queima, para evitar a propagação da infecção, se for caso.