




### INSTRUÇÕES DE USO – Baina para Dilatação Ureteral

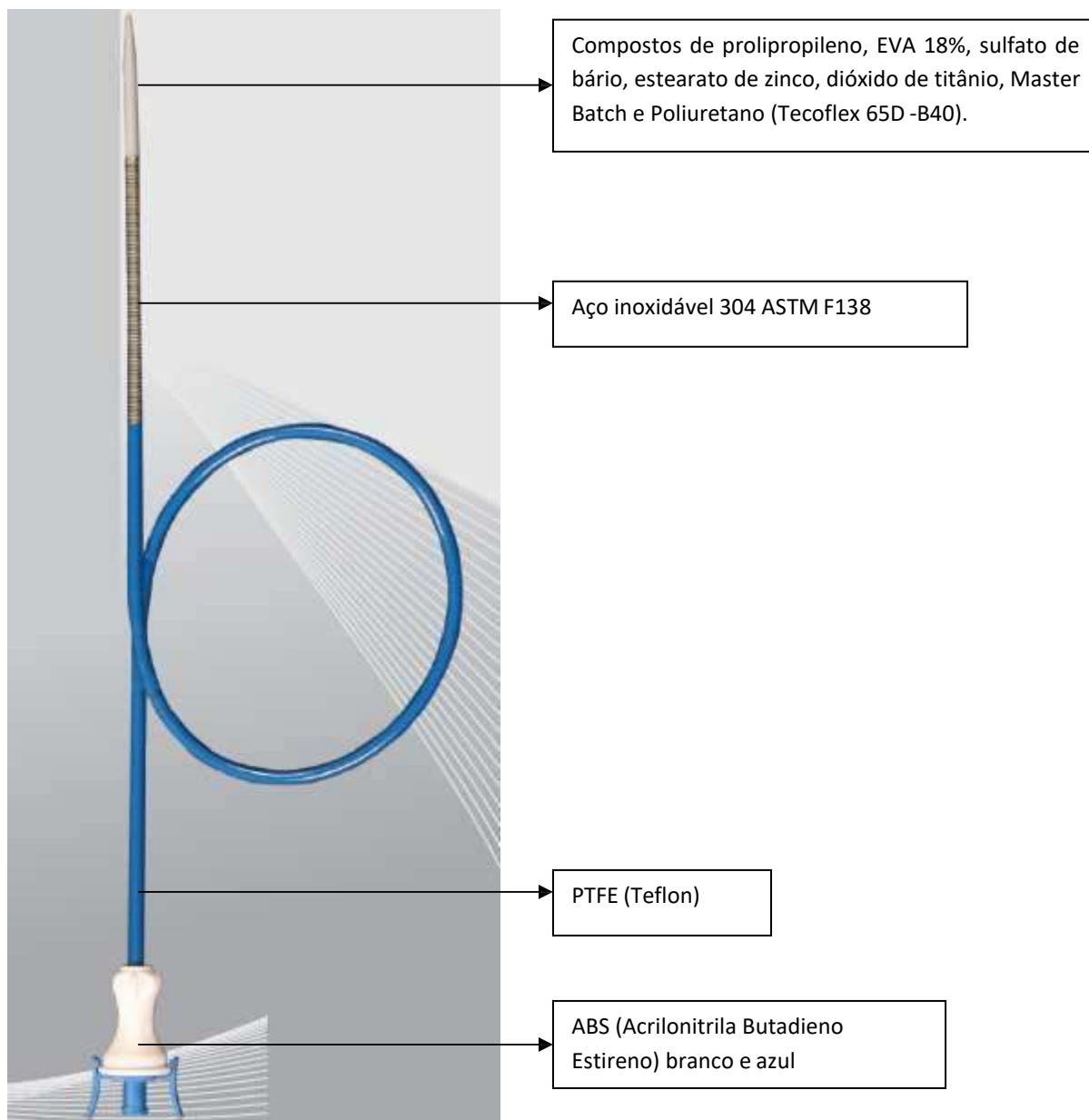

#### **Indicação de Uso:**

Usada para estabelecer uma conduta endoscópica durante procedimentos urológicos facilitando a passagem de endoscópios e outros instrumentos no trato urinário. O cateter eixo trançado proporciona dilatação ureteral e um canal contínuo de trabalho para a introdução dos endoscópios e instrumentos durante os procedimentos de acesso ureteral. E protege a uretra durante a troca de instrumentos repetidamente, reduzindo o potencial para trauma. O canal contínuo também protege os delicados instrumentos e os escopos menores flexível de danos, e redução de reparações dispendiosas.

**Método de Uso:**

1. Coloque um fio guia de 0.038”;
2. Observe o sentido da deflexão da bainha girando-a sempre na alça do dispositivo. Retorne a bainha para a posição reta antes de prosseguir;
3. Lave o dilatador e a bainha com água salina ou estéril para ativar o revestimento hidrofílico;
4. Monte a bainha de acesso desviando do acesso renal, inserindo a extremidade cônica do dilatador no punho da bainha;
5. Avance o dilatador através da bainha até que o mesmo não possa seguir;
6. Garanta o travamento da bainha com firmeza para tirar a tampa do dilatador para o funil;
7. Avance o aparelho sobre o fio guia no ureter até o local desejado. A bainha é radiopaca para facilitar a colocação e penetração;
8. Remova o dilatador, mantendo a bainha no lugar;
9. Introduza o instrumento desejado através da bainha o quanto for necessário;
10. Caso haja necessidade de realizar um pielograma retrógrado, o dilatador deve ser reinserido na bainha e o contraste deve ser introduzido utilizando o dilatador;
11. Para desviar a extremidade distal da bainha, gire a alavanca no cabo do aparelho. A bainha é radiopaca e sua deflexão da ponta pode ser controlada por técnicas radiopacas;
12. Alterne o mecanismo de travamento para garantir o ângulo de deflexão;
13. Desligue o mecanismo de travamento e endireite a bainha antes da remoção.

**Advertências:**

Fabricante recomenda uso único.

Esterilizado por gás de Óxido de Etileno.

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA.

O uso deste dispositivo deve ser baseado em consideração de fatores de risco-benefício que se aplicam a cada indivíduo. O consentimento do paciente deve ser informado para ser obtido a adesão do paciente a procedimentos de acompanhamento.

**Contraindicações:**

Os pacientes que são contraindicados para procedimentos urológicos retrógrados, presença de estenose apertada, o que limitaria a utilização do dispositivo; presença de grandes pedras obstruindo o ureter. As possíveis complicações associadas ao uso do dispositivo de acesso transuretral incluem: Irritação da mucosa, inflamação e edema, estenose ureteral, sangramento ou hemorragia aguda; bexiga uretra ou perfuração ureteral; outras lesões do trato urinário.