

INSTRUÇÃO DE USO

Agulha Múltipla Para Coleta

■ 1. MODELOS APLICÁVEIS

Descrição	Modelo
Agulha múltipla para coleta de sangue à vácuo 21G. 100 un/cx.	FL5-A21G
Agulha múltipla para coleta de sangue à vácuo 22G. 100 un/cx.	FL5-A22G

■ 2. USO PRETENDIDO

As **agulhas múltiplas para coleta** são utilizadas para a coleta de amostras de sangue venoso e são utilizadas em conjunto com tubos para coleta de sangue à vácuo e com adaptadores para agulhas/tubos.

Uso em diagnóstico *in vitro*.

■ 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As **agulhas múltiplas para coleta** são compostas por aço ABNT 304 e plástico (PVC) e estéreis por óxido de etileno.

FL5-A21G: Capa plástica de proteção verde e tamanho da agulha de 25x0,8mm.

FL5-A22G: Capa plástica de proteção preta e tamanho da agulha de 25x0,7mm.

■ 4. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 - Encaixar a agulha no adaptador. Não remover a capa plástica de proteção da agulha.

2 - Ajustar o garrote no braço do paciente para escolher a veia para realizar a punção.

3 - Após a veia escolhida, limpar a superfície com álcool 70%.

4 - Retirar a capa plástica de proteção da agulha. Inserir a agulha na veia do paciente e introduzir o tubo no suporte.

NOTA: Ocasionalmente pode ocorrer vazamento de sangue a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar o risco de exposição.

5 - Soltar o garrote assim que o sangue fluir para o tubo.

6 - Após finalizar a coleta, retirar a agulha do braço do paciente e pressionar com algodão.

7 - Descartar a agulha em uma caixa própria para o descarte de materiais perfurocortantes.

■ 5. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco, longe da luz solar e líquidos cáusticos.

■ 6. PRECAUÇÕES

1 - Não utilizar caso a proteção individual esteja danificada ou não devidamente encaixada;

2 - Proibido reprocessar;

3 - Produto de uso único;

4 - Descartar após o uso;

5 - Antes do uso, verificar a ponta da agulha.

6 - Caso tenha algum defeito, como rebarbas, não utilizar;

7 - Não utilizar após o prazo de validade descrito na etiqueta do produto;

8 - A utilização do produto deve estar em conformidade com as especificações relevantes do departamento médico ou requisitos regulamentares;

9 - Este produto deve ser utilizado apenas por médicos treinados ou pessoal de enfermagem.

■ 7. VALIDADE

As agulhas múltiplas para coleta apresentam validade de 24 meses.

■ 8. GARANTIA

A Firstlab Industria Importação e Exportação Produtos para Laboratórios Ltda garante que as agulhas múltiplas para coleta, em condições normais de uso, não apresentam defeitos de material pelo período de validade do produto. Esta garantia exclui danos resultantes de transporte, mau uso, descuido ou negligência. A responsabilidade da Firstlab referente à garantia do produto é limitada ao recebimento de evidências de que o defeito encontrado está dentro dos termos de garantia citados acima. Todas as reivindicações em relação à garantia devem ser apresentadas de acordo com a validade de cada produto.



■ 9. DISTRIBUÍDO POR

Firstlab Indústria Importação e Exportação de Produtos para Laboratórios Ltda.

Avenida Rui Barbosa, 5525 – Bloco B Galpões 1 e 2 –
São José do Pinhais – PR – CEP: 83.040-550 | **CNPJ:**
27.089.709/0001-61

Telefone: +55 (41) 3888.0888

■ 10. REGISTRO ANVISA

81628880026

■ 11. RESPONSÁVEL TÉCNICA

Ayná dos Santos Mendes | CRBio: 66.772/07-D