

Cadastro / Registro M.S.:

10369460025

Modelos cadastrados:

Coletor de Urina Infantil Modelo Unisex - 01 unidade
Coletor de Urina Infantil Modelo Feminino - 01 unidade
Coletor de Urina Infantil Modelo Masculino - 01 unidade

Indicação de Uso:

O coletor de urina infantil, como seu próprio nome indica, destina-se à coleta de urina em crianças de modo asséptico destinadas a culturas microbiológicas e outros exames onde seja necessário uma coleta asséptica.

Instrução de uso:

1. Verificar a integridade da embalagem e data de validade do produto
2. Identificar o paciente em etiqueta própria para esta finalidade e afixar sobre o coletor.
3. Abrir a embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso.
4. Fixar o coletor de urina na pele da criança de modo a deixar a uretra em contato com a abertura do saco plástico.
5. Após a realização da coleta encaminhar ao laboratório de análises clínicas.
6. Após a realização do exame, o técnico do laboratório deverá descartar o coletor em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

Condições de armazenamento: transportar a temperatura ambiente.

- **Condições de transporte:** transportar a temperatura ambiente.
- **Condições de manipulação:** manipular a temperatura ambiente.

Advertência/Precaução:

- **Precauções:**

Não utilizar se a embalagem estiver danificada, molhada ou aberta.

Verificar a data de validade do produto antes do uso.

Não re-utilizar o coletor sob nenhuma circunstância.

Descarte: descartar em recipiente apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Validade:

Produto com validade de 3 anos, a partir da data de fabricação.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado/Distribuído:**Importador:**

Matriz: Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda.

Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011- 40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J Lanzillo – CRF/SP: 41067

Fabricante:

SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD.

20, Xingshan Road of Tech Industrial Development Zone.

Weihai, Shandong

República Popular da China.