



## NYLON

### Descrição

A sutura de Nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Sutures Cirúrgicas não absorvíveis.

### Indicação

Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias.

### Ação

A sutura de Nylon causa uma resposta inflamatória nos tecidos, seguida por encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo. A sutura do Nylon não é absorvida, e não ocorre qualquer mudança significativa na retenção da força tênsil "in vivo".

### Contra-Indicação

O produto é contra indicado em procedimentos onde haja o contato prolongado com soluções salinas como as encontradas no trato biliar e urinário, podendo resultar na formação de cálculos.

### Cuidados

O dispositivo só poderá ser utilizado por ou sob orientação de cirurgião segundo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só deverá ser manipulado por pessoal qualificado. Não re-esterilizar, descartar produto aberto e não utilizado, descartar sobras e não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou molhada. Descartes de suturas utilizadas: adotar medidas de biosegurança e descarte internos, considerando risco de contaminação biológicas e materiais perfurocortantes. Descarte de suturas não utilizadas: adotar medidas de descarte internos para materiais perfurocortantes. Na manipulação deste produto deve-se tomar cuidados para que seja feito de modo asséptico. Não utilizar o produto além do prazo de validade.

### Precauções

Na manipulação desta ou qualquer outro tipo de sutura cirúrgica deve-se tomar cuidados para não contaminar os fios, manipular em local asséptico, para não danificar a sutura. Evitar o dobramento e esmagamento das agulhas pelo manuseio inadequado de pinças e porta-agulhas.

### Instruções de Uso

Utilizar a quantidade de sutura necessária, de acordo com a extensão da ferida cirúrgica e técnica adotada pelo cirurgião.

### Reações Adversas

Ocasionalmente pode ocorrer eritema, leve dor no local da sutura causado pelo trauma da ferida cirúrgica no tecido.

### Conservação

Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

### Apresentação

A sutura Nylon é apresentada nos N°s cirúrgicos de 12-0 a 10, métrico 0,01 a 12. Apresenta-se em comprimentos pre-estabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos.

### Validade

A sutura de Nylon tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.

### CAIXA COM 12 e 24 ENVELOPES

### PRODUTO DE USO ÚNICO.

### NÃO RE-ESTERILIZAR.

### ESTÉRIL.

### DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

### MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO.

### SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

FÁBRICA - AV. HERMÓG. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA

CEP 76100-000 - FONE: (64)3671-1453 - FAX: (64)3601-1576

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Farmacêutica Responsável:

Dr<sup>a</sup> CÍNTIA FLORENTINO DE CASTRO COSTA - CRF-GO 6035

VENDAS - AV. C-255 N° 270-SALAS: 606/611

CENTRO EMPRESARIAL SEBBA - NOVA SUIÇA

CEP: 74280-010 - FONE/FAX:(62)3259-4546 - GOIÂNIA - GO

Registro no Ministério da Saúde N° 10243410009 (Agulhado) e

N° 10243410031 (Não Agulhado)