

## **Máscara Tripla Soldada Descartável - Medi Company**

**Fabricado e Distribuído por:** MEDI COMPANY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.

**CNPJ:** 37.787.749/0001-30

**Endereço:** Rua Edgard Ajax dos Reis, Nº 274 - Novo Parque São Vicente – CEP: 16200-318 – BIRIGUI/SP

**NÚMERO PROCESSO ANVISA:** 25351.469511/2021-26

**REGISTRO ANVISA:** 82200480001

**Indicação de Uso:** As Máscaras Cirúrgicas Medi Company são indicadas como proteção contra agentes contaminantes provenientes das vias respiratórias, assim como também impedir a passagem de fluídos. A finalidade das máscaras é proteger os profissionais da área da saúde e pacientes, impedindo a passagem de agentes contaminantes, sangue e fluídos corpóreos, durante procedimentos médicos, odontológicos e cirúrgicos.

**Modo de Uso:** 1- Retirar a máscara da embalagem original;

2- Colocar a máscara sobre o rosto;

3- Ajustar o elástico atrás das orelhas;

4- Ajustar o clipe da máscara ao nariz;

5- Abrir a porção das pregas até completo ajuste ao rosto;

6- Após o uso, descartar em recipiente para materiais contaminados.

O tempo de uso das máscaras é determinado pelo tempo em que ela se apresente íntegra, limpa e seca.

**Advertências e Precauções:** -Caso os elásticos de fixação arrebentem a máscara deve ser trocada;

-O produto é de uso único.

-Descartar após o uso.

-Produto não estéril.

Atenção: NUNCA se deve realizar a limpeza da máscara já utilizada com nenhum tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não podem ser limpas ou desinfetadas para uso posterior, e quando úmidas perdem a sua capacidade de filtração.

-Não utilize o produto se a embalagem estiver violada, danificada ou úmida.

-Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajustar com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;

-Enquanto estiver em uso, evitar tocar na parte da frente da máscara;

-Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente da máscara, mas remover sempre pelas tiras de elástico);

-Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente na máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos;

-Substituir as máscaras por uma nova máscara limpa e seca, assim que tornar-se úmida;

-Não reutilizar máscaras descartáveis;

