

Indanox
REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO
BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA
REMOVE OXIDAÇÃO, MANCHAS E CROSTAS
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
USO RESTRITO ASSISTÊNCIA À SAÚDE
LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO

INDICAÇÃO:

Remover ferrugem, manchas e crostas em instrumentos de aço inox (bandejas, mesas, macas, cubas, paredes de autoclaves e etc).

COMPOSIÇÃO:

Veículo, Ativo (Ácido Fosfórico), Solvente e Tensoativo não Iônico.

INSTRUÇÕES DE USO:

LIMPEZA MANUAL: Diluir 100mL de INDANOX para cada 500mL de água quente (50°C a 70°C) em recipiente plástico ou de aço inox; Mergulhe os instrumentais limpos na solução e deixe agir por 30 minutos em completa imersão, verifique se não ficou nenhuma bolha de ar nos instrumentos ociosos; Exponha e acione os instrumentos articulados abrindo-os totalmente; Usando uma escova não metálica, escove as manchas em intervalos regulares de tempo para melhor desempenho; Enxague abundantemente com água.

LIMPEZA AUTOMÁTICA: Diluir 100mL de INDANOX para cada 900mL de água quente (50°C a 70°C) no equipamento; Mergulhe os instrumentos limpos na solução e deixe agir por 15 a 30 minutos; Em seguida enxague abundantemente ou seguindo as instruções do fabricante do equipamento.

AUTOCLAVES: Deixar as paredes internas da Autoclave resfriar; Diluir 100mL de INDANOX para cada 900mL de água quente (50°C a 70°C); Deixar agir por 15 a 30 minutos. Escove com escova não metálica em intervalos regulares; Enxague abundantemente com água.

ADVERTÊNCIAS:

Não reutilize embalagens vazias do produto; Mantenha o produto em sua embalagem original; Mantenha o produto fechado e ao abrigo da luz solar direta; Evite inalação ou aspiração, contato direto com os olhos e mucosas; Não ingerir o produto; **MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

RESTRIÇÕES DE USO:

Não se aplica.

PRECAUÇÕES:

Não misturar com outras substâncias alcalinas (hipoclorito de sódio e hidróxido de sódio); Não usar em materiais cromados, aço carbono, banhados de prata e ouro.

Ao manusear o produto utilizar equipamentos de proteção individuais (máscaras, luvas de borracha, protetor facial, óculos e aventais impermeáveis).

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto; Em caso de contato com os olhos e mucosas, lavar com água em abundância as partes atingidas e persistindo a irritação consultar um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto; Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO LIGUE: CEATOX: 0800-722-6001.

LOTE E VALIDADE:

Lote/Fabricação: Verificar embalagem

Validade: 24 meses.

APRESENTAÇÕES:

500mL - 24 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
500mL DOSADOR - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
1L - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
1L DOSADOR - 12 FRASCOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;
5L - 4 GALÕES DESCARTÁVEIS EM CAIXA DE PAPELÃO;

**Algumas apresentações, venda sob consulta.*

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

ASPECTO: Líquido

COR: Incolor

ODOR: Característico

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

PH: 0,10 a 2,00

DENSIDADE (g/cm³): 0,990 a 1,200

REGISTRO ANVISA:

Núm. Aut. ANVISA/MS 3.02637.0

Registro ANVISA n°: 326370018



**EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO**