

PRÁTICO 100

DESINFETANTE HOSPITALAR - DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Prático 100: Detergente desinfetante concentrado, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, equipamentos, produtos médicos e artigos hospitalares de nível intermediário.

CARACTERÍSTICAS

Prático 100: Detergente desinfetante concentrado hospitalar que tem como princípio ativo a Polihexametileno Biguanida (PHMB) a 350ppm e Quaternário de Amônio a 520 ppm em solução pronto-uso. O PHMB é um biocida de amplo espectro que possui atividade comprovada sobre as bactérias Gram +, Gram – e, Mycobactérias, fungos, esporos e vírus H1N1. Possui rápida ação bactericida na presença de matéria orgânica.

PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Prático 100: possui atividade contra os seguintes microrganismos: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae carbapendemase, Acinetobacter baumani, Staphylococcus MRSA, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis (BCG).

COMPOSIÇÃO

Polihexametileno biguanida (PHMB), Quaternário de Amônio, Surfactante, Corante e água q.s.p.

MODO DE USAR

Prático 100: possui uma diluição de 1:100 litros de água. É só seguir a tabela de diluição no rótulo e deixar o produto em contato com o material ou superfície por 10 minutos, não necessita enxaguar. Muito Prático!!

Tabela para Diluição do Prático 100.

Quantidade de Água (Litros)	Quantidade de Prático 100 (mL)
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50

Para desinfecção de superfícies fixas: Aplicar o produto, deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: Imergi-los na solução, deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos.

Para desinfecção de nível intermediário: Lavar, enxaguar e secar os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergi-los na solução, deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

PRÁTICO 100

DESINFETANTE HOSPITALAR - DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Solução	Especificação
pH	Concentrado	6,00 a 8,00
Densidade	Concentrado	1,000 a 1,020 g/mL
Aparência	Concentrado	Líquido Azul
Odor	Concentrado	Característico

EMBALAGENS / RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 12 frascos, com dosador, de 1 litro.

Caixas de papelão com 4 frascos de 5 litros.

SEGURANÇA NO USO

Sempre utilizar EPI's. O contato direto e/ou prolongado pode causar irritações a pele, mucosas e olhos. Em caso de irritação lave o local com água em abundância, lave sempre as mãos e antebraços antes e após o uso de produtos químicos. Em caso de ingestão, não provocar vômito, encaminhar a vítima ao auxílio médico, emergências entrar em contato com o centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110.

RESTRIÇÕES DE USO

Não misturar o Prático 100 a outros produtos químicos eles podem prejudicar seu desempenho, principalmente com produtos alcalinos como o cloro.

ARMAZENAMENTO

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Todos os produtos Cosmoderma estarão sempre acompanhados de laudos técnicos com análises físico-químicas para assegurar sua qualidade.

LEGISLAÇÃO

Produto risco II - PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA - Nº 346280002.

Categoria:

-DesinfetanteHospitalardeNívelIntermediário:
RDC nº 14, de 28 de fevereiro de 2007.

RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010.

- Informações de rótulos: RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008.

RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.