

# **INDICPERAC 2000**

## **BOLETIM TÉCNICO**

**Indicperac 2000:** Fitas indicadoras para quantificação de ácido peracético 0,2% p/p.

### **INSTRUÇÕES DE USO:**

#### **DOSAGEM (FITA TESTE)**

Para não contaminar a unidade onde está ocorrendo a desinfecção, colocar luvas de procedimentos antes de mergulhar a fita na cuba de imersão.

- 1) Após colocar as luvas, mergulhar a fita na solução Percac 2000 durante 5 a 10 segundos;
- 2) Logo em seguida, retirar a fita e eliminar com cuidado o excesso da solução, que pode dificultar a visualização do resultado.
- 3) Aguardar por 30 segundos;
- 4) Comparar a cor que aparecer na fita com as cores que aparecem na escala de cores do frasco, que determinam os níveis de Ácido Peracético na solução.

### **IMPORTANTE**

O excesso de solução na fita pode dificultar a visualização do resultado em razão da reflexão da luz na superfície.

Não inserir a mão ou objetos contaminados no interior do frasco.

Após aberto utilizar no prazo de 06 meses.

### **EMBALAGENS**

Frasco plástico com 30 unidades.

### **PRAZO DE VALIDADE**

24 meses com o frasco lacrado.

06 meses após a abertura do frasco.

### **ARMAZENAMENTO**

Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

# **INDICPERAC 2000**

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **TRANSPORTE**

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

### **LEGISLAÇÃO**

Informamos que, em observância aos critérios do Ministério da Saúde para produtos Saneantes, correlatos, definidos nas Resoluções RDC 59/2010, RDC 185/2001, RDC 3/2012 e GCM 47/07, as fitas-testes de medição química são isentas de Notificação/Registro na ANVISA.