



Globodesc

Globodesc Ind. Com. Import e Export de Produtos Médicos Hospitalares Eirelli

AVENTAL STANDARD DESCARTAVEL SMS COM TOALHA ESTÉRIL



1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Avental de procedimento cirúrgico com toalha, confeccionado em não tecido 100% polipropileno tecnologia SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) diga-se (não tecido TNT- filtro anti bacteriano – não tecido TNT), com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) superior a 91%, manga longa, com punho de malha, tiras no pescoço e na cintura, proporcionando um fechamento total, atóxico, hemorrepele, hidorrepele, hipoalergênico e com baixo desprendimento de partículas.

- Cor: Azul.
- Gramatura: 40 50,60 Gr
- Embalagem: unitária embalada em papel grau cirúrgico e esterilizado a ETO,
- Estéril

2. INDICAÇÃO: Vestimenta descartável, indicada para utilização por profissionais de saúde em atividades e procedimentos cirúrgicos, com finalidade de proteção contra possíveis contaminações contra líquidos e fluídos diversos. Produto de uso único, descartável após o uso. Uso externo.

3. APRESENTAÇÃO: Embalagem unitária embalada em papel grau cirúrgico e esterilizado a ETO, dobrado de forma a facilitar a paramentação, com dados de identificação do produto, data de fabricação, nº de lote, e prazo de validade.

4. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIO. Confeccionado em material leve, maleável e resistente, oferecendo segurança e conforto ao usuário.

- Não emite partículas para o meio ambiente, ajudando a prevenir a contaminação bacteriana. São fabricados com material hipoalergênico, atóxico, resistente ao rasgo e a tração.
- Descartável para maior higiene e segurança.
- Resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias.
- Elevada inércia química.

5. INSTRUÇÕES PARA O USO: 1) Abrir e retirar da embalagem o avental, desdobrando-o. 2) introduzi-lo pelas aberturas dos braços, e em seguida ajustar ao corpo com as tiras de fixação de acordo com os procedimentos e técnicas padronizadas pela unidade de saúde. 3) após o uso descartar em local apropriado.

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeira, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o seu transporte.

7. PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após fabricação.

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA / MS SOB Nº 81988620002

FABRICAÇÃO: GLOBODESC INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

CNPJ: 11.137.546/0001-05
Rua: QUINTINO BOCAIUVA, 335 – CENTRO ICO - CE Tel. (85) 99231 2221
Resp. Téc. Jaqueline Gomes Ribeiro CRQ Nº 18200006

www.globodesc.ind.br
globodec@globodec.ind.br

GLOBODESC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI

R QUINTINO BOCAIUVA, 335 – CENTRO – ICO – CE – CEP 63430-000
CNPJ: 11.137.546/0001-05 – Tel: (85) 99231-2221 / (11) 2626-9892 / (85) 3182-5115
E-mail: globodesc@globodesc.ind.br