

**INSTRUÇÕES DE USO –  
MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO M2LIFE**

**Nº Registro ANVISA:** 81911930011

**Nome Técnico:** Máscaras

**Imagens do Produto**



**Indicação de Uso**

As máscaras descartáveis cirúrgica tripla com elástico tem como objetivo possibilitar a proteção e a prevenção da contaminação viral ao usuário, que ocorre através de respingos por gotículas respiratórias, através da boca e nariz do usuário. O produto é indicado para o uso em clínicas, hospitais, indústrias e laboratórios.

**Apresentação**

As Máscaras descartáveis cirúrgica tripla com elástico M2LIFE vem em embalagens plásticas e/ou caixas contendo 50 unidades.

**Composição / Dimensões**

A Máscara descartável cirúrgica tripla com elástico é constituída em tecido não-tecido, constituída 100% em Polipropileno. O corpo da máscara tem suas camadas externas em TNT (tecido não tecido) hidrofóbico de gramatura 25g/m<sup>2</sup> e a camada intermediária possui filtro (Spunbond Meltblown) de gramatura 25g/m<sup>2</sup>. A máscara possui também um clipe nasal adaptável para se ajustar ao nariz assegurando desta forma um melhor ajuste da máscara ao rosto. A máscara facial possui uma alça elástica para se ajustar às orelhas.

Tamanho do produto – 17,5 cm X 9,5 cm e 14,5 cm x 9,5cm;

Cor – Branca e Colorida;  
Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE)  $\geq 95\%$ ;  
Eficiência de Filtração de Partículas (EFP)  $\geq 95\%$ ;  
Propagação de chama Classe 1;  
Pressão diferencial  $< 49,03 \text{ Pa/cm}^2$ ;  
Resistência a fluídos acima de  $10,7 \text{ kPa}$ ;  
Resistência a tração nos elásticos  $\geq 11,3\text{N}$ .

### **Instruções de uso**

A fim de alcançar a melhor eficiência de proteção, certifique-se de usar de acordo com as instruções abaixo:

- 1 - Realize os procedimentos padrões de assepsia "nas mãos" antes de retirar a máscara da embalagem;
- 2 - Retire uma unidade de máscara da embalagem e passe as alças de elásticos por de trás da orelha em ambos os lados. Observar o lado das alças, as quais ficará em contato com a pele.
- 3 - Ajuste os cliques no formato do nariz de modo que a extremidade superior da máscara tem boa aderência com o nariz e rosto. Certificando-se de que não haja lacunas;
- 4 - Descartar a máscara após o uso e/ou troque-a por uma nova máscara a cada 4 horas, uma vez molhada e/ou contaminada com fluídos.

### **Advertências, Precauções e Cuidados Especiais**

- 1 - Verifique na etiqueta os seguintes dados: data de fabricação e validade, para certificar-se de que o produto encontra-se válido;
- 2 - Não use o produto após o vencimento;
- 3 - Não use o produto se a embalagem estiver danificada e/ou molhada;
- 4 - Siga as instruções de uso do fabricante;
- 5 - O produto é para uso único e deve-se descartar conforme regras sanitárias vigente;
- 6 - Proibido reprocessar;
- 7 - Produto não estéril;
- 8 - Caso as tiras e/ou elásticos de fixação arrebenhem a máscara deve ser trocada;
- 9 - Produto atóxico e apirogênico;
- 10 - Este produto não é para uso em alambiques, tanques, espaços fechados ou em quaisquer circunstâncias onde é provável que o gás esteja presente, ou em atmosferas deficientes em oxigênio;
- 11 - Nunca compartilhar este produto com outra pessoa, pois o risco de infecção pode ser alto;
- 12 - Não usar este produto em crianças com idade inferior a 2 anos;
- 13 - Não usar este produto em uma pessoa com deficiência que não pode usar uma máscara, ou não pode usar uma máscara com segurança, por motivos relacionadas à deficiência.

### **Validade, Cuidados no Armazenamento e Transporte**

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, fresco e seco, protegidos de umidade, calor excessivo e da luz solar direta. A temperatura de armazenamento recomendada é de entre -5°C + 50°C e umidade relativa abaixo de 90% para garantir a integridade do produto. Respeitar o empilhamento máximo do produto a fim de garantir a integridade do produto.

### **Fabricado**

Hubei Best Import & Export Co.,Ltd.

No. 29F, Gaotou Chuanghui Chanye Yuan, Gutian 2nd Road, Qiaokou District, Wuhan City, Hubei Province, China.

### **Importado e Distribuído por:**

M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ 30.820.069/0002-03

Rua Manoel Vieira Garção, nº 77. Térreo, Sala 503. Itajaí – SC.

Fone: +55 45 3065-0828

sac@m2life.com.br

**Responsável Técnico:** Marcelo Galindo Lahoud / CRQ/SC N° 09203411