

## EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

### Cadastro / Registro M.S.:

80495519011

### Modelos

Equipo de Nutrição Enteral

### Indicação de uso

Os Equipos de Nutrição Enteral, dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Desenvolvido para administrar soluções enterais, realizando a ligação entre a sonda de alimentação enteral ligada ao paciente e o recipiente de solução que contém o alimento a ser administrado.

### Especificação técnica

Fabricados em polietileno, polipropileno e Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (ABS).

Câmara gotejadora flexível de 48mm

Macrogotas 20gotas/ml

Não possui entrada de ar (respiro)

Não possui filtro de solução

Não possui injetor lateral

Ponta perfurante com tampa protetora

Tubo flexível de PVC de 150cm na cor azul

Pinça rolete reguladora de fluxo

Conector escalonado com tampa protetora

Possui DEHP

Látex free

Validade 5 anos após data de esterilização

Estéril

Descartável e de uso único

Atóxico e apirogênico

### Apresentação

Embalagem principal: blister em papel grau cirúrgico com 01 unidade.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 350 unidades; caixa de papelão contendo 400 unidades; caixa de papelão contendo 450 unidades; caixa de papelão contendo 500 unidades.

### Orientações de Uso

Antes de fazer a conexão do frasco ao equipo, garanta que pinça do rolete esteja fechada, para que o produto não seja desperdiçado.

Antes de conectar o equipo ao paciente, coloque o frasco acima da cabeça do mesmo, no suporte específico para isso, e abra a pinça, garantindo o preenchimento do equipo e a saída completa do ar. Quando o equipo estiver completamente preenchido, feche a pinça.

Conecte o tubo à sonda do paciente e abra a pinça, tomando cuidado para que o gotejamento não esteja muito rápido.

Verifique se a sonda esteja fixa, garantindo que a alimentação esteja sendo feita da forma correta.

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não utilizar em bomba de infusão.

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

#### Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br medixbrasil



Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;  
Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

### Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

### Códigos de Barra

EAN13

7898652373084

EAN14

17898652373081

### Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 01 de 06/06/2022

Imagens meramente ilustrativas:



#### Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

[medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br)     medixbrasil

