

## GARROTE (TORNIQUETE) DESCARTÁVEL LÁTEX FREE

### Cadastro / Registro M.S.:

80495510142

### Modelos

Rolo e tiras

### Indicação de uso

É usado para fixar a veia na coleta de sangue ou transfusão de sangue, bem como punção venosa para outros fins médicos.

### Especificação técnica

Composição: TPE

Não estéril

Não talcado

Látex free

### Modelos:

Rolo: 25 peças (de 0.6mm×25mm×450mm) destacável a cada 45cm – cor laranja

Tiras: 100 peças de 0.6mm×25mm×450mm cada – cor azul

Validade: 3 anos após a data de fabricação.

### Apresentação

Embalagem Primária:

- 1 rolo com 25 unidades por caixa
- 100 tiras por caixa

Embalagem Secundária:

- 100 caixas com 25 rolos cada
- 10 caixas com 100 tiras cada

### Orientações de Uso

1. Passe o garrote por baixo do local a ser puncionado
2. O garrote deve ser colocado no braço do paciente próximo ao local da punção (4 a 5 dedos ou 10 cm acima do local de punção), sendo que o fluxo arterial não poderá ser interrompido. Para tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar palpável.
3. Puxe a duas pontas para cima e em seguida passe uma por baixo da outra e solte.
4. O garrote não deve ser deixado no braço do paciente por mais de um minuto. Deve-se retirar ou afrouxar o garrote logo após a venipunção, pois o garroteamento prolongado pode acarretar alterações nas análises.

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“USO ÚNICO!” “DESCARTAR APÓS O USO” “PROIBIDO REPROCESSAR”

Verifique a integridade da embalagem, caso ela apresente sinais de abertura não utilizar;

Utilizar técnicas assépticas antes e durante o procedimento;

Descartar em locais apropriados, conforme a legislação vigente da vigilância sanitária local;

Armazenar em locais limpos, secos, livres dos raios solares e vapores químicos.

Não aplicar pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo do sangue para a extremidade.

Liberar o torniquete assim que o sangue começar a fluir no primeiro tubo.

Estase muito prolongada pode contribuir para a hemólise.

Não utilizar o torniquete em pele que apresente ferimento.

Não utilizar o produto sobre a pele lesada;

Não utilizar em vasos visivelmente flebitados.

Ler as instruções de uso antes de utilizar o produto

Torniquetes perdem facilmente a forma sob alta temperatura.

#### Matriz

- +55 45 3039 4242
- Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

- +55 47 3439 2114
- BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
- medixbrasil.com.br
- medixbrasil



Este produto está sujeito a desgaste e se deteriora com o uso. É essencial que este dispositivo seja inspecionado antes de cada uso.

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

### Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº665 de 30 de março de 2022

### Códigos de Barra

EAN13

7898652375750 - Rolo

7898652375767 - Tiras

EAN14

17898652375757

17898652375764

### Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 00 de 29/12/2022

Imagens meramente ilustrativas:



#### Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

[medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br)  medixbrasil





Matriz

☎ +55 45 3039 4242  
📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114  
📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC  
🌐 [medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br) 📱 medixbrasil

