

LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL “SOFT”

Cadastro / Registro M.S.:

80495519089

Modelos

21G, 26G e 28G;

Indicação de uso

A Lanceta de Segurança Descartável “Soft” é utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para doseamentos laboratoriais e aferição de glicemia. A indicação de cada tamanho específico é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado para utilizar o dispositivo.

Especificação técnica

Fabricada em aço inoxidável, ABS e polipropileno;

Ponta da Agulha lubrificada, tri facetada, lisa sem rebarbas, punção mais suave, menos dor;

Mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes;

Moldagem por injeção integrada do corpo da agulha, o corpo da agulha não é exposto ao ar, evitando efetivamente a poluição do corpo da agulha.

Estéril, atóxico e apirogênico

Validade 3 anos após a data de esterilização.

Modelos:

Tamanho 21G – 1,8mm (profundidade) - azul

Tamanho 26G – 1,8mm (profundidade) - amarelo

Tamanho 28G – 1,8mm (profundidade) - roxo

Apresentação

Embalagem primária: Caixa contendo 100 unidades;

Embalagem secundária: Caixa contendo 20 caixas com 100 unidades cada.

Orientações de Uso

1. É necessário verificar o produto antes de usar.
2. Não use o produto se estiver danificado ou aberto.
3. É necessário verificar a especificação do produto antes do uso.
4. Desinfete o local da punção; não toque novamente após a desinfecção.
5. Desparafuse a tampa protetora.
6. Pressione levemente a lanceta na pele, no local da punção para completar a coleta de sangue.
7. Após o uso, o produto deve ser tratado como lixo hospitalar.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ; PROIBIDO REPROCESSAR; PRODUTO ESTÉRIL.”

Ler atentamente as Instruções de Uso:

Não utilizar se a embalagem estiver violada;

Este produto foi projetado e deve ser usado apenas uma vez. Não reutilize.

Descartar e não usar quando a tampa protetora não estiver conectada;

Não use o produto se a tampa protetora cair;

Utilizar sempre técnicas assépticas, no manuseio;

Use o produto com segurança para evitar ferir você ou outras pessoas;

Use o produto apenas dentro do prazo de validade;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br medixbrasil



Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652377143 – 21G

7898652377150 – 26G

7898652377167 – 28G

EAN14

17898652377140 – 21G

17898652377157 – 26G

17898652377164 – 28G

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01 de 13/03/2023

Imagens meramente ilustrativas:



Matriz
☎ +55 45 3039 4242
📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial
☎ +55 47 3439 2114
📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil

