

SERINGA BICO CATETER DESCARTÁVEL

Cadastro / Registro M.S.:

80495510141

Modelos

60mL;

Indicação de uso

Desenvolvidas para aspiração e injeção de grandes volumes líquidos, soluções e alimentação enteral.

Especificação técnica

Fabricadas em Polipropileno

Lubrificadas com silicone: reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo;

Corpo transparente: permite a visualização nítida do fluído aspirado;

Anel de retenção: impede o desprendimento do êmbolo;

Êmbolo de borracha natural (contém látex)

Sem agulha;

Bico Tipo Cateter para facilitar nos encaixes de cateteres, sondas de alimentação enteral, sonda foley, sonda nasogástrica, entre outros na aspiração ou de grande quantidade de líquidos e soluções.

Graduação:

60ml: graduação principal de 10 em 10 e a secundária de 2 em 2ml;

Validade 5 anos após data de esterilização;

Estéreis – óxido de etileno

Atóxicas e apirogênicas;

Descartáveis e de uso único.

Apresentação

Embalagem principal: Embaladas individualmente em filme termoplástico e em papel grau cirúrgico; cartucho de papelão contendo 25 unidades.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo: 300 unidades (12 caixas com 25 unidades)

Orientações de Uso

Selecionar o tipo de seringa a ser utilizada conforme sua graduação.

Abrir a embalagem através da técnica asséptica (sempre através da pétala);

Utilizar a seringa conforme técnica adequada para administração ou coletas de fluidos orgânicos;

Para aspirar a solução/dieta enteral com a seringa, conecte a seringa na sonda e retraia o êmbolo, aspirando lentamente o líquido para o interior da seringa, evitando bolhas;

Após o uso, descartar o produto em local adequado e seguro.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”, “NÃO DEVEM SER REUTILIZADAS”, “PROIBIDO REPROCESSAR”, “DESTRUIR APÓS O USO”; “ESTÉRIL”

“Ler atentamente as Instruções de Uso”;

Contém Látex.

Dotadas de bicos tipo cateter, sendo mecanicamente impossível de conectar qualquer dispositivo intravenoso, eliminando o risco de danos aos pacientes por conexão acidental.

Não é de uso hipodérmico, não contém bico tipo luer, portanto não conecta à agulhas hipodérmicas.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil



Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/20225 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652374920 – 60ML SLIP

EAN14

17898652374927

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 03 de 06/10/2022

Imagens meramente ilustrativas:



Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br    medixbrasil

