

1- CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:**Nome técnico do produto:**

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2S

Registro do Produto: CA: 47.828

Nº de Registro na anvisa: Processo de Solicitação

Responsável Técnico: Antonio Celso Ribeiro – Registro Crea nº 5070465830

Apresentação comercial do Produto:

7898706040207 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de orelha- Branco- Emb. Caixa c/ 10 unid);
7898706040337 - Máscara de Proteção PFF- 2S (elástico de orelha- Branco- Emb. Pct c/ 10 unid);
7898706040245 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de orelha- Branco- Emb. Caixa c/ 25 unid);
7898706040214 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de orelha- Branco- Emb. Unit);
7898706040283 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Branco- Emb. Pct c/ 10 unid);
7898706040238 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Branco- Emb. Caixa c/ 25 unid);
7898706040276 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Branco- Emb. Unit);
7898706040290 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Branco- Emb. Caixa c/ 10 unid);
7898706040221 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de orelha- Preto- Emb. Caixa c/ 10 unid);
7898706040344 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de orelha- Preto- Emb. Pct c/ 10 unid);
7898706040269 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de orelha- Preto- Emb. Caixa c/ 25 unid);
7898706040191 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de orelha- Preto- Emb. Unit);
7898706040306 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Preto- Emb. Caixa c/ 10 unid);
7898706040320 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Preto- Emb. Pct c/ 10 unid);
7898706040252 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Preto- Emb. Caixa c/ 25 unid);
7898706040313 - Máscara de Proteção PFF-2S (elástico de cabeça- Preto- Emb. Unit);

2. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

TNT (Tecido não tecido) 100% polipropileno. Elásticos Roliço Ergonomicos: poliamida /elastano fio de poliéster texturizado. Clipe Nasal: Arame revestido, liso e moldável

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: (ABNT NBR 13698:2011)**Máscara de Proteção PFF-2S com Elástico ajuste na orelha /Sem Válvula**

Dimensões da máscara: Comprimento mínimo: 20,6cm x Largura fechada 8,4cm e Largura aberta 17cm

Elásticos: Ajustável e Confortável

Clip nasal: 9cm

Cada máscara deve conter 2 elásticos.

Máscara de Proteção PFF-2S com Elástico ajuste na cabeça /Sem Válvula

Dimensões da máscara: Comprimento mínimo: 20,6cm x Largura fechada 8,4cm e Largura aberta 17cm

Elásticos: Ajustável e Confortável

Clip nasal: 9cm

Cada máscara deve conter 2 elásticos.

A Máscara de Proteção PFF-2S é confeccionada com o material:

4 camadas 100% polipropileno, sendo: 3 camadas externas e 1 (uma) camada interna de elemento filtrante (Melt blown).

- O clip nasal em arame revestido, liso e moldável.

- Elástico roliço Ergonômico/ versão ajuste na cabeça e de ajuste na orelha.

- Sem Válvula de exalação.

Formato: tipo dobrável, com soldagem ultrassônica em seu perímetro.

Cores: Branco e Preto



FICHA TÉCNICA MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL PFF2

Rev.00

Resistência a respiração

Classificação: PFF2S

Máxima resistência permitida (Pa) por:

INALAÇÃO (Fluxo ar contínuo de 30 L/min: 70 e Fluxo de ar contínuo de 95 L/min: 240.)

EXALAÇÃO (Fluxo de ar contínuo de 160 L/min^a: 300)

Penetração máxima permitida do aerossol de ensaio (%)

Classificação: PFF2S

Ensaio com cloreto de sódio com fluxo contínuo de ar de 95 L/min: 6

Ensaio com óleo de parafina ou DOP com fluxo contínuo de ar de 95 L/min: 6

4. INDICAÇÃO AO USO:

O produto é indicado para uso nos hospitais, laboratórios, clínicas, indústrias e ambientes externos. Com a finalidade de proteção contra: poeiras, névoas e fumos.

5. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: A máscara funciona como barreira filtrante, proteção das vias respiratórias do usuário contra: poeiras, névoas e fumos.

6. Instrução ao Uso para Máscara de Proteção PFF-2S com Elástico ajuste na orelha: Remova a máscara da embalagem, puxe o elástico para os lados. Abra a aba inferior e a aba superior do clip, totalmente. Encaixe a máscara sob o queixo, puxando os elásticos, posicionando-os atrás das orelhas. Ajuste o clip no nariz. Após o ajuste, cubra a máscara as mãos e expire fortemente. Caso o ar escape pela extremidade, repita as fases anteriores com o maior cuidado. Utilizar a máscara no Máximo um turno de trabalho. Após o uso, descartar em local apropriado.

Instrução ao Uso para Máscara de Proteção PFF-2S com Elástico ajuste na cabeça: Remova a máscara da embalagem, deixando as duas abas do elástico para baixo. Abra a aba inferior e a aba superior do clip, totalmente. Encaixe a máscara sob o queixo, puxando o elástico de baixo, posicionando-o na nuca. Ajuste o elástico de cima sobre a cabeça e pressione o clip no nariz. Após o ajuste, cubra a máscara as mãos e expire fortemente. Caso o ar escape pela extremidade, repita as fases anteriores com o maior cuidado. Utilizar a máscara no Máximo um turno de trabalho. Após o uso, descartar em local apropriado.

Limitação de uso: A máscara deve ser descartada após no máximo um turno de trabalho. Substituir a máscara quando sentir desagradável resistência a respiração.

7. Condições armazenamento: Deve ser armazenado em local limpo, seco e arejado, ao abrigo da luz solar e em temperatura ambiente de forma a garantir a integridade física e funcional da embalagem e do produto.

8. Condições transporte: Deve ser transportado de forma segura a garantir a integridade física e funcional da embalagem e do produto. Evitar calor excessivo, o ambiente deve estar limpo e seco, protegido da luz solar direta.

9. Condições manipulação: Deve ser descartado em local adequado.

10. Advertências: Verificar a vedação antes da utilização; Pessoas com barba, costeletas ou cicatriz na área da vedação da máscara ao rosto, são contraindicadas ao uso; não utilizar a máscara em atmosfera explosiva ou deficiente de oxigênio; A máscara PFF-2S, não possui manutenção.

Precauções: Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora do seu prazo de validade; descartar em local apropriado.

Manter sempre em sua embalagem original.

9. EMBALAGEM PRIMARIA:

Caixa de papel cartão, laminada, com impressão.

Sing Way Industria e Comercio LTDA.

CNPJ: 10.872.908/0001-49

Rua: Pacifico, 104, Granja Viana II

Cotia - SP | CEP 06707-065

Email: contato@sigway.com.br - Tel: 55 (11) 4169-3973

	<p align="center">FICHA TÉCNICA MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL PFF2</p>	<p align="right">Rev.00</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Fechada e lacrada com lacre antifraude.

EMBALAGEM SEGUNDARIA:

Caixa de papelão com impressão

Medidas: 500 x 190 x 410 mm

Paletização: Base 12 caixas e Altura 4 caixas. 48 caixas por palet

PARA MAIORES INFORMAÇÕES e assistência em relação aos produtos Medway para o Mercado Médico-Hospitalar, entre em contato com o seu representante local da Medway ou ligue para o Fale com: (11) 4169 - 3973