

Manual de Instruções





olá, somos Mikatos®



Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso
antes de colocar o aparelho em funcionamento.

Lanterna Clínica Mikatos®



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

FINALIDADE

A Lanterna Clínica Mikatos® foi desenvolvida para que todos os profissionais da saúde possam auxiliar nos exames clínicos de rotina em Hospitais, Clínicas e Consultórios Médicos em geral.



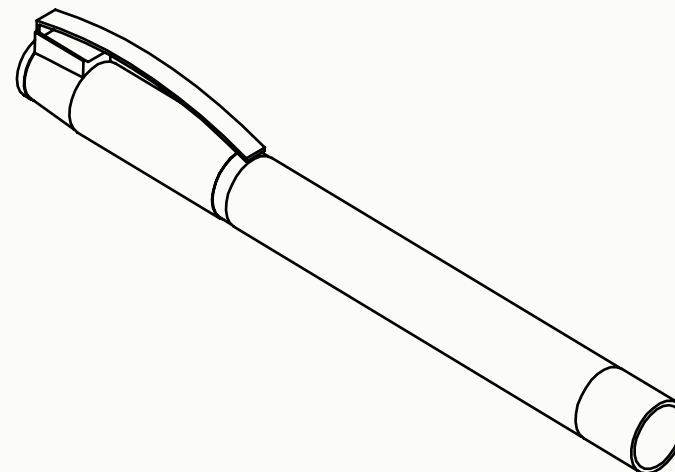


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

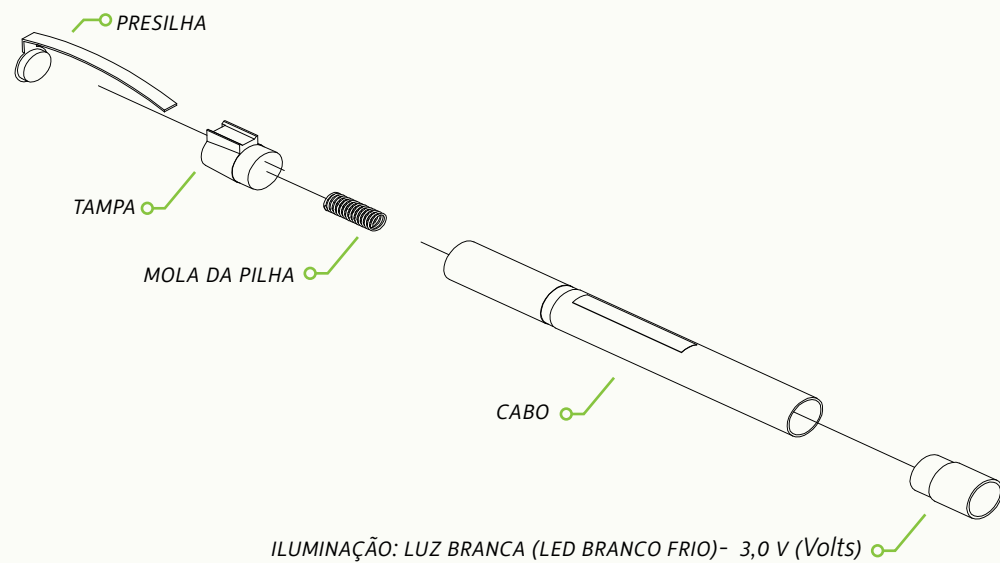

Componentes do produto


Lanterna Clínica Mikatos®

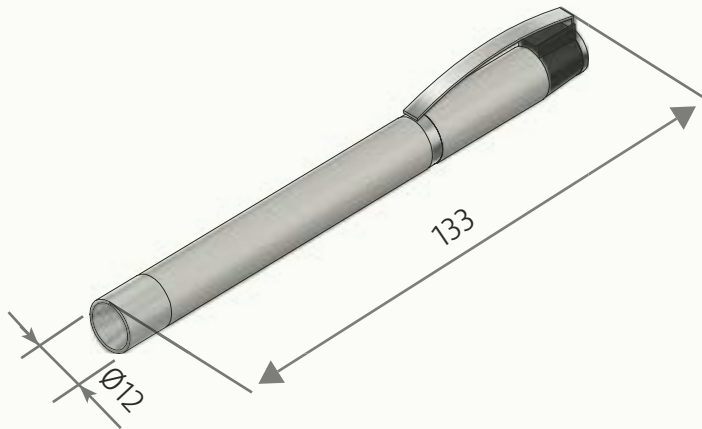

Dimensões gerais da Lanterna Clínica Mikatos LED®

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

CORES

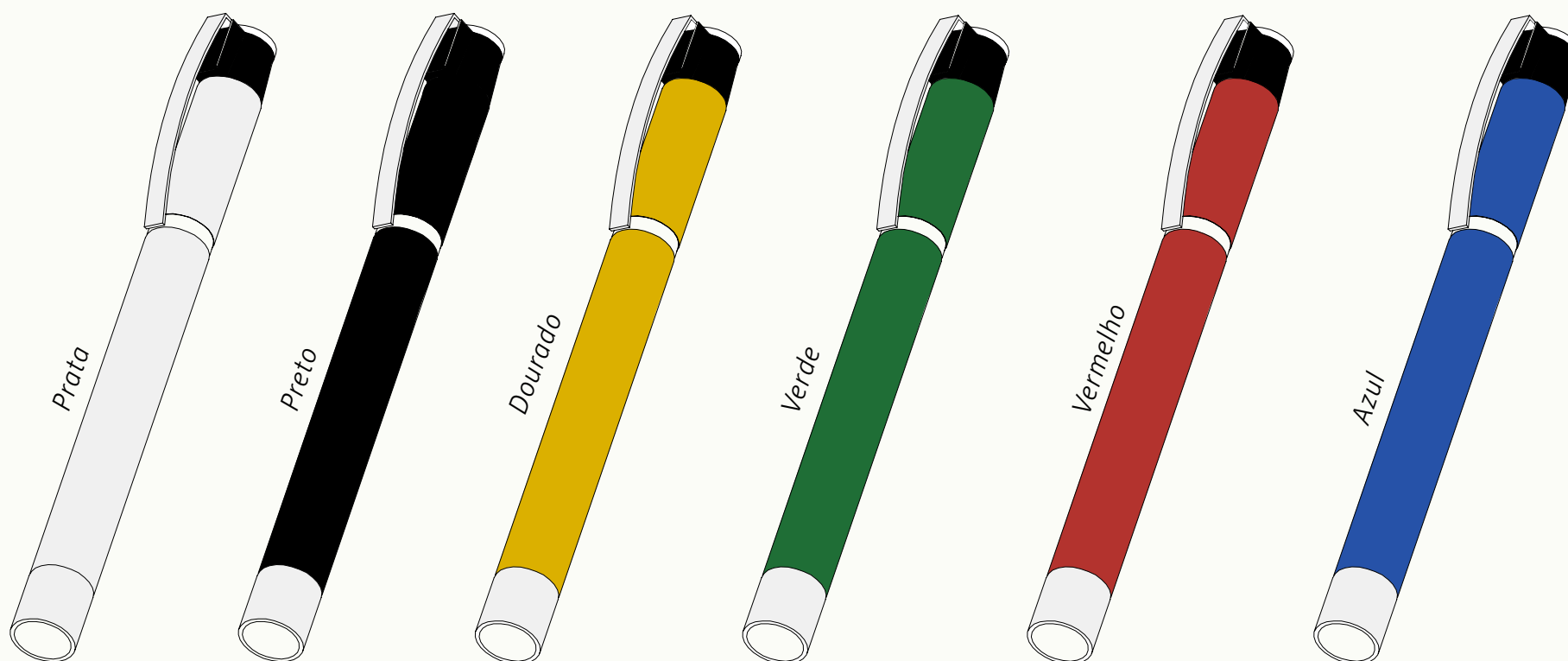

INSTRUÇÕES

- ✓ Desrosqueie a tampa da extremidade do cabo girando no sentido anti-horário
- ✓ Insira duas pilhas alcalinas tamanho “AAA” (tipo palito) de modo que o polo positivo aponte para o lado superior do cabo.
- ✓ Para conseguir a eficiência ideal de luz, recomendamos sempre utilizar pilhas novas de alta qualidade (tipo alcalinas)
- ✓ Rosquear a tampa da extremidade girando no sentido horário até o completo fechamento
- ✓ Em seguida, segurar o cabo e empurrar com leve pressão a presilha de Aço contra o mesmo para ligar o LED
- ✓ As pilhas devem ser retiradas após cada utilização

Procedimentos operacionais e instruções de uso

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- ✓ Iluminação: Luz Branca (LED Branco Frio)
- ✓ Tensão Elétrica: 3 V (Volts)
- ✓ Fluxo Luminoso: 4.000 mCd (miliCandelas)
- ✓ Temperatura de Cor: 5.500 - 6.000 K (Kelvin)
- ✓ Vida útil: 20.000 h (horas - mínima)

Dados técnicos

COMPONENTES

- ✓ 01 - LANTERNA CLÍNICA MIKATOS®
- ✓ 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA
- ✓ 01 - ESTOJO DE PAPELÃO

**O APARELHO NÃO
VEM ACOMPANHADO
DE PILHAS**

INSTRUÇÕES GERAIS

A limpeza e desinfecção de produtos médicos serve para proteger o paciente, o usuário e terceiros e para maior preservação dos produtos.

A validade dos produtos é determinada pelo funcionamento deles e pelo manuseio cuidadoso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A Lanterna Clínica Mikatos® pode ser limpa externamente com um pano seco e produtos neutros. Seque em seguida com um pano seco que não solte fíapos.

Orientações para cuidados e limpeza



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Nunca colocar a Lanterna Clínica Mikatos® em líquidos! Garantir que nenhum líquido penetre no interior da carcaça! O produto não deve ser utilizado na limpeza e esterilização de máquinas. Isso causa danos irreparáveis!

A higienização é fundamental para evitar contaminações que possam trazer prejuízos ao profissional e ao paciente.

Evitar movimentos bruscos, quedas ou batidas no aparelho.

ARMAZENAMENTO

Para preservar o aparelho contra a deterioração, o mesmo deve ser guardado em local protegido do calor, umidade e das intempéries atmosféricas.

Orientações para cuidados e limpeza



CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, assegura ao proprietário do produto, Garantia contra falha material e humana na produção, pelo prazo constante no Manual de Instruções a contar da data da Nota Fiscal de compra do cliente/ usuário.

O aparelho tem Garantia de **01 ano** contra defeitos de fabricação e desgaste natural. Estão **cobertas** pela Garantia, no entanto, as peças, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal do material.

A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro.

Eventuais despesas de transporte entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto.

Exija do seu Revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

As substituições ou reparos feitos durante o período de Garantia não acarretam a prorrogação do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra.

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI.

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS Nº 325 - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES/SP
CEP: 06817-170 - SAC - (11) 4781-8001

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS SIMÕES
CONFEA – CREA/SP – Nº 060113888-1

REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - M.S.: Nº 80218930014
VALIDADE DO PRODUTO: 02 ANOS

