

## INSTRUÇÕES DE USO

**Produto:**

Fio de Linho com agulha

**Versão:**

003

**Fabricante:**

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

**Distribuidor Nacional:**

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

## **DESCRIÇÃO**

Os fios cirúrgicos de Linho com agulha são de origem vegetal, fabricadas com fio não absorvível multifilamentar de fibras celulósicas do *Linum Visitatssimum* L, reunidas e torcidas. Os fios de Linho são apresentados na cor branca.

## **INDICAÇÕES**

O produto é utilizado para efetuar o fechamento de incisões cirúrgicas contribuindo com o processo de cicatrização dos tecidos. Indicado para suturas do aparelho digestivo. Aplicando nas bordas das feridas cirúrgicas.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

Os fios de sutura de Linho não são recomendados para procedimentos que se espera absorção do fio, por se tratar de um fio natural não absorvível.

## **PRECAUÇÕES E ORIENTAÇÕES ADEQUADAS PARA USO CORRETO E SEGURO DO PRODUTO**

É recomendado que ao manusear este ou qualquer outro material de sutura, tome-se o cuidado para evitar danos de manuseio. Evitar amassar ou enrugar o produto ao utilizá-lo junto com instrumentos cirúrgicos, tais como pinças ou porta-agulhas.

Recomenda-se que medidas cautelares sejam tomadas e que a embalagem seja aberta de modo asséptico imediatamente antes do uso, minimizando a possibilidade de contaminação.

A Sutura de Linho não deve ser utilizada após seu prazo de validade.

A embalagem garante a esterilidade do produto, desde que não aberta ou danificada.

A embalagem não devem ser autoclavadas.

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada;

Uso exclusivo de profissionais de saúde;

O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um dispositivo médico de uso único.

Adote procedimentos de descarte levando em conta o risco de contaminação.

Descarte corretamente os materiais não usados e as embalagens abertas.

Produto não fervível;

**‘Não reutilizar.’**

**“Não reesterilizar.”**

**“Produto para saúde de uso único.”**

**“Proibido reprocessar.”**

**“Produto estéril.”**

## **INSTRUÇÕES DE USO**

Utilizar os fios de sutura de Linho de tamanhos e diâmetros adequados e de acordo com o procedimento cirúrgico pretendido.

O profissional da saúde que irá realizar o procedimento deve decidir, com base em sua experiência e conhecimento, o modelo de sutura apropriado a ser utilizado após avaliar as condições do paciente e técnica cirúrgica a ser aplicada.

O uso deste produto deve estar de acordo com os procedimentos cirúrgicos aplicáveis e indicados para suturas não absorvíveis, considerando a área de aplicação.

Escolha um porta-agulhas correto para utilização na agulha, um produto de qualidade e com um design adequado.

Não esmague ou deforme o fio de sutura usando o porta-agulha.

Durante o manuseio, para evitar danos à ponta da agulha e ao encastoamento, deve-se prender a agulha com ajuda de instrumental apropriado, mantendo aproximadamente 1/3 a 1/2 de distância entre a ponta afiada e a extremidade encastoada.

Não segure a agulha com muita pressão, com pinças afiadas ou defeituosas, pois podem danificar a agulha com maior propensão a quebrar ou dobrar.

Ao puxar a agulha após a passagem pelo tecido, tome cuidado para não danificar sua ponta, mantenha-a o mais próximo possível da posição inicial.

Deve-se ter cuidado ao manusear a agulha do produto para evitar perfurações indesejadas.

A espessura do tecido a ser suturado deve ser proporcional ao tamanho da agulha.

Não torça ou use força excessiva ao perfurar o tecido com a agulha.

Agulhas com pontas desgastadas ou danificadas devem ser substituídas.

Use a agulha correta para cada tipo de tecido e ao suturar tecidos em áreas confinadas ou mais profundas, proceda com cautela.

## **FORMAS DE APRESENTAÇÃO**

Cartuchos contendo 24 unidades.

## **ARMAZENAGEM E TRANSPORTE**

Armazenar o produto a uma temperatura em torno de 30°C variação de mais ou menos 2°C, com umidade em torno de 60% e ao abrigo da luz direta.

## **VALIDADE**

Validade de 5 anos a partir da data de fabricação, desde que mantida a integridade da embalagem.

## **ESTERILIZAÇÃO**

Produto estéril.

Esterilizado por Óxido de etileno (ETO).

## **FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:**

### **BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA**

CNPJ: 37.844.479/0001-52

Avenida Maranhão, nº 500, Bairro Jundiaí, CEP: 75.110-470

Anápolis - Goiás - Brasil

Tel.: 55 (62) 3324-2120, 3703-2200

Fax: 55 (62) 3324-3072, 3703-2224/2225

Site: [www.biolinefios.com.br](http://www.biolinefios.com.br)

E-mail: [sac@biolinefios.com.br](mailto:sac@biolinefios.com.br)

Indústria Brasileira

R.T / T.R: Alexandre Faria Vasconcelos - CRQ XII - 12200147