

**NOME DO PRODUTO: CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA DE USO PERIFÉRICO SOBRE A AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - POLYMED**

Registro MS: 10150470473

#### **DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Agulha

Matéria Prima: Poliuretano

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: ( x ) Sim ( ) Não

Validade: 5 anos

#### **USO ÚNICO**

#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança – POLYMED é um dispositivo radiopaco para acesso de infusões venosas com filtro e dispositivo de segurança que recobre o bisel da agulha protegendo o profissional da área da saúde, atendendo a NR32.

#### **INDICAÇÃO DE USO**

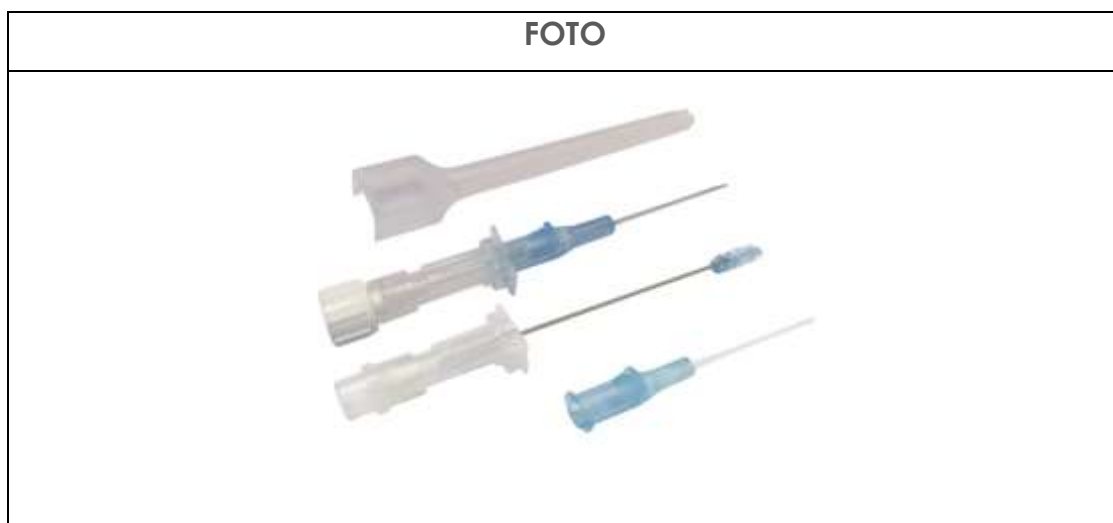
O Cateter para infusão intravenosa de uso periférico sobre agulha com dispositivo de segurança Polymed é utilizado para infusão de fluidos, soluções e administração de medicamentos em geral. Na manutenção da hidratação e/ou correta rehidratação em pacientes incapazes de ingerir uma quantidade suficiente de volumes líquidos por via oral. Utilizado para a transfusão de sangue ou componentes do sangue.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- Selecione o calibre desejado de acordo com o paciente e as condições de punção;
- Abra a embalagem
- Verifique se as conexões estão presas, afim de evitar qualquer vazamento durante a punção;
- Remova a tampa de proteção;
- Mantenha o bisel do mandril virado para cima. Confira a posição, checando a marca do posicionamento;
- Realize a antissepsia da pele na região onde será feita a punção;
- Faça a punção e observe se a agulha foi corretamente posicionada numa angulação de 30° a 45° e realize a perfuração da pele;
- Abaixe a angulação, observe o refluxo de sangue na câmara de refluxo e deslize o cateter sobre agulha;
- Segure o cateter firmemente usando a técnica em V e retire o mandril;
- O dispositivo de segurança será acionado no momento da retirada da agulha.
- Realize a fixação conforme protocolo da instituição

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Capa de agulha	Polipropileno
Canhão da agulha	Polipropileno
Corpo do cateter	Polipropileno
Câmara flash back (c/ filtro)	Resina K
Plug luer lock	HDPE
Anel deslizante	Poliacetato
Ponta clip de segurança	Polycarbonato
Arruela da ponta clip de segurança	Aço inóx AISI 304
Anel de silicone	Silicone
Clipe de segurança metálico	Aço inóx AISI 304
Parte plástica do clip de segurança	Acrilonitrila-butadieno-estireno
Filtro Porex	Polietileno
Cateter	Poliuretano
Cânula da agulha	Aço inóx AISI 304


**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO	COMP	COR
11100	Cateter Intravenoso Periférico em Poliuretano com dispositivo de segurança - POLYMED	14G	45mm	LARANJA
11101	Cateter Intravenoso Periférico em Poliuretano com dispositivo de segurança - POLYMED	16G	45mm	CINZA
11104	Cateter Intravenoso Periférico em Poliuretano com dispositivo de segurança - POLYMED	18G	32mm	VERDE
11105	Cateter Intravenoso Periférico em Poliuretano com dispositivo de segurança - POLYMED	20G	32mm	ROSA
11106	Cateter Intravenoso Periférico em Poliuretano com dispositivo de segurança - POLYMED	22G	25mm	AZUL
11107	Cateter Intravenoso Periférico em Poliuretano com dispositivo de segurança - POLYMED	24G	19mm	AMARELO

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

Cateter para infusão intravenosa de uso periférico sobre agulha com dispositivo de segurança Polymed é embalado individualmente em blíster e PVC.

Caixa com 50 unidades

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Deve ser conservado em ambiente seco e arejado

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Proibido reinserir agulha no cateter, risco de cortar o mesmo;

Não deve ser utilizado com fluídos de alta viscosidade

Não deve ser utilizado em grandes transfusões de sangue

Não deve ser utilizado em pacientes com conhecida sensibilidade a matéria prima de seus componentes.

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cfernandes.com.br](http://www.cfernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259