



BANDAGEM TIPO COBAN

Uma única bandagem para
diversas finalidades



Vantagens

- Preço baixo
- Macia e flexível
- Fácil de rasgar
- Não gruda na pele nem no cabelo
- Não deixa resíduos na pele
- Não afrouxa com o movimento
- Antiderrapante e fácil de usar

Fácil de usar

Baixo Custo

Eficiente



Indicações


- Imobilização de entorses em geral
- Fixação de talas, caneleiras e outros dispositivos médicos
- Fixação de curativos
- Segurar bolsa de gelo em lesões
- Derrame articular
- Controle de edema
- Imobilização pós-cirúrgica
- Proteção de tornozelos em jogadores de futebol

Alta Elasticidade




200% de elasticidade

Fácil corte

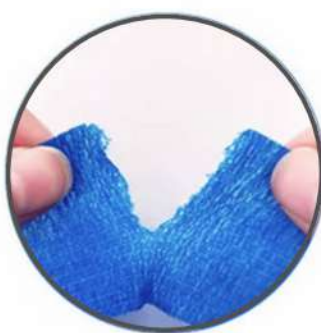

Respirável

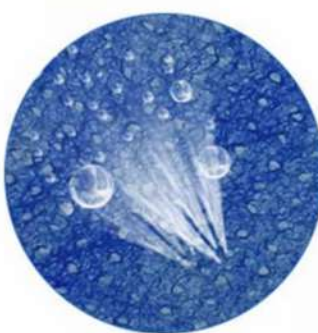

Resistente à água





Evo Tape Coesiva

É uma bandagem elástica, constituída de não-tecido e elastômero

Ela é macia, possui alta resistência e fixa sobre ela mesma.

Pode ser aplicada usando diversas técnicas de bandagem como compressão, imobilização e proteção de articulações e ainda fixação de diversos tipos de equipamentos médicos.

Modo de Usar

1. Corte a bandagem de tamanho adequado para a aplicação.
2. Limpe o local a ser aplicado.
3. Posicione a parte do corpo onde a bandagem será aplicada, no ângulo correto e em uma posição confortável.
4. Colocar a bandagem com a tensão adequada para garantir a fixação ou imobilização necessária, evitando o efeito garrote ou que ela escorregue com os movimentos.





CONTATO



/lupmed



/lupmed



(11) 96642-0965

info@lupmed.com.br

