



Bandagem Coesiva

Apresentação

Dimensões de 5cm x 4,5m
Dimensões de 7,5cm x 4,5m
Dimensões de 10cm x 4,5m
Anvisa: 80718470033

Composição

Bandagem constituída de não-tecido sintético, elastômero, spandex. Não contém látex.

Descrição do Produto

Bandagem elástica, constituída de não-tecido e elastômero. Adere fortemente sobre ela mesma. Pode ser aplicada usando diversas técnicas de bandagem de compressão, imobilização e fixação. Recomendadas para tratamentos nas áreas de ortopedia, traumatologia e medicina esportiva, especialmente na prevenção de lesões e para fixação de curativos e dispositivos médicos

Indicação de Uso

Indicado para luxação, entorse e imobilização em tratamentos ortopédicos, para estabilização das articulações e/ou correção postural. Ajuda na prevenção e tratamento de lesões articulares. Auxilia em vários tratamentos ortopédicos e aumenta a fixação de curativos, bandagens e dispositivos médicos.

Mecanismo de Ação

A elasticidade da bandagem e sua auto aderência permite que, ao ser aplicada, imobilize ou proteja partes do corpo, ou ainda fixe dispositivos médicos para que eles permaneçam nos locais desejados. Possui grande poder de fixação e imobilização. Deve ser aplicada de acordo com a finalidade desejada, preferencialmente por um profissional habilitado.

Modo de Uso

1. Limpar o local onde a bandagem será aplicada;
2. Posicionar a parte do corpo onde a bandagem será aplicada, no ângulo correto e em uma posição confortável;
3. Colocar a bandagem com a tensão adequada para garantir a fixação ou imobilização necessária e evitar efeito garrote, ou ainda que ela escorregue durante a movimentação do paciente;
4. Recomenda-se que o uso seja feito sob supervisão de profissional habilitado.

Advertências

Em caso de formigamento, pressão, coceira ou ardor, retirar a bandagem imediatamente.

Precauções

Evitar o efeito torniquete.
Não usar diretamente sobre feridas abertas
Recomenda-se uso único deste dispositivo.

Efeitos Adversos

Em raríssimos casos podem ocorrer intolerâncias cutâneas e alergias relacionadas aos componentes da bandagem.

Prazo de validade - 36 meses

Armazenamento

Manter em local protegido de chuva e sol direto, e em sua embalagem original. Faixa de temperatura ambiente para armazenamento: 0 a +40 graus Celsius;
Faixa de umidade relativa para armazenamento: 35% a 75%

Transporte

Evitar quedas. Ao transportar proteja a embalagem da chuva direta. Respeitar o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.
Faixa de temperatura ambiente para transporte: 10 a +40 graus Celsius;
Faixa de umidade relativa para transporte: 45% a 75%

Produto não estéril.

Importador



Lupmed Comercial Distribuição & Importação Ltda
Av. Sagitário, 138 – Torre City – Sala 1005
Cep 06473-073
Fone: 11 41535599
Cel: 11 96642 0965
Barueri – SP - Brasil