

CIRCUITO HAOXI PARA PAINEL RÉGUA AMBULÂNCIA



Esta Instrução de Uso apresenta as informações necessárias para a correta utilização do Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância.

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

FABRICADO POR:

Rioxi Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares EIRELI

Rua Anhembí, 80 – Jardim Caravelas – São Paulo/SP – CEP: 04728-010

CNPJ: 41.621.496/0001-06 – I.E.: 131.018.686.111 – AFE ANVISA nº: 8.23.535-9

Fone: +55 (11) 5642-1666 / 5642-0091 / 5642-0004 / 5642-2556

DISTRIBUIDO POR:

Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – São Paulo/SP – CEP: 04727-040

CNPJ: 05.678.146/0001-04 – IE: 116.613.824.117 – AFE ANVISA nº: 8.01.900-1

Fone: +55 (11) 5642-0587 – www.haoxi.com.br

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA

Nome Técnico: Painel Multifuncional

Nome Comercial: Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância

Número de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA: 82353590025

Responsável Técnico: Sibila de Carvalho Arruda – CRF/SP: 106904

DESCRIÇÃO

O Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância é indicado para distribuir a rede de gases medicinais em pontos de apoio aos materiais e equipamentos auxiliares em diversos ambientes. As principais áreas de aplicação do Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância destes produtos são: Hospitais, Clínicas, Centros cirúrgicos, Ambulatórios, UTI e Ambulância.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

A rede de gás medicinal é conectada ao Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância e através de interligação de tubos do circuito é dividido em pontos podendo ser de 1, 2, 3 ou 4.

APRESENTAÇÃO

Os Circuitos Haoxi para Painel Régua Ambulância estão disponíveis conforme o número de pontos de saída e conforme o tipo de gás medicinal.

• Circuitos Haoxi para Painel Régua Ambulância para Oxigênio

Código	Produto
PA4609	CIRCUITO HAOXI COM 1 PONTO PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (ET)

PA4629	CIRCUITO HAOXI COM 1 PONTO PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (ECR)
PA4630	CIRCUITO HAOXI COM 1 PONTO PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EPB)
PA4607	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (MA-I)
PA4608	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EE)
PA4612	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA
PA4639	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (UM)
PA4641	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (NK)
PA4642	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EILD)
PA4643	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (REV)
PA4649	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (MA-II)
PA4613	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EILE)
PA4618	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (MA-I)
PA4619	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (NK)
PA4621	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (REV)
PA4622	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (AL)
PA4623	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA
PA4624	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EE)
PA4626	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EC)
PA4648	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (MA-II)
PA4616	CIRCUITO HAOXI COM 4 PONTOS PARA OXIGÊNIO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA

● **Circuitos Haoxi para Paineis Régua Ambulância para Ar comprimido**

Código	Produto
PA4627	CIRCUITO HAOXI COM 1 PONTO PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (MA)
PA4628	CIRCUITO HAOXI COM 1 PONTO PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (AL)
PA4606	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EE)
PA4611	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (MA)
PA4638	CIRCUITO HAOXI COM 2 PONTOS PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (REV)
PA4614	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA
PA4646	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EC)

PA4647	CIRCUITO HAOXI COM 3 PONTOS PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA (EILD)
PA4617	CIRCUITO HAOXI COM 4 PONTOS PARA AR COMPRIMIDO PARA RÉGUA AMBULÂNCIA

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- O Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância deve ser manuseado por pessoal qualificado e operado por pessoal treinado.
- É imprescindível a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUÇÃO antes de utilizar o Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância.
- Leia com atenção esta instrução de uso para utilizar corretamente o produto. Deve-se tirar o máximo proveito dos recursos relatados.
- A utilização do produto antes do completo entendimento das suas características e funções, resulta em condições de risco para o paciente e o próprio produto.
- Verifique se as conexões disponíveis estão devidamente identificadas e estão em perfeito estado de conservação.
- Verifique se não há vazamentos nas conexões, utilizando um pincel e solução com água e sabão neutro (espuma).
- Teste as conexões anteriormente a sua utilização a fim de minimizar qualquer mau funcionamento durante o procedimento específico
- Não fume na área onde o produto está instalado e utilizado.
- Nunca use óleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o oxigênio, sob risco de explosão.
- A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas.
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada nesta instrução de uso.
- Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE e/ou DESINFECTE, não esterilizar em autoclave. A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem prejudicar o profissional e o paciente.
- Não tente fazer qualquer reparo no Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância.
- Só utilize o Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância em perfeitas condições, qualquer anormalidade contate imediatamente o serviço de Assistência Técnica Rioxi.
- A manutenção deste produto só deve ser feita por pessoal técnico treinado, qualificado e autorizado pela Rioxi.
- Ao contatar o serviço de Assistência Técnica da Rioxi, tenha em mãos a nota fiscal e o número de lote informado na embalagem do produto.
- Verifique se o produto está instalado adequadamente, cheque se não há vazamento no produto.
- Produto NÃO ESTÉRIL, é preciso desinfetar antes do uso.
- NÃO ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE e/ou TERMODESINFECTORA, pois não suporta as temperaturas deste processo e será danificado.

- A não observância destas precauções será considerada como um mau uso do produto.
- Caso não siga as precauções descritas, isso pode provocar desconforto ao paciente e ao profissional, e será considerado mau uso do produto.

INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO E USO

1) Antes de utilizar o Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância, certifique-se:

- a) Se estão disponibilizadas as conexões necessárias para os equipamentos e acessórios a serem utilizados durante o procedimento a ser executado.
- b) Quando esta condição não estiver atendendo, providenciar a remoção do paciente para um local que atenda esta necessidade ou se possível substituir os acessórios ou equipamentos necessários de forma que sejam compatíveis com as conexões necessárias.
- c) As conexões devem ser utilizadas com o máximo de cuidado, observando todas as recomendações das técnicas envolvidas nos procedimentos médicos específicos e as orientações específicas do fabricante de equipamentos que venham a ser conectados ao painel.
- d) As conexões de gases devem ser firmemente conectadas de forma a não permitir nenhum tipo de vazamento entre o painel e a mangueira de conexão e/ou equipamentos.

2) Procedimento para uso:

- a) Verifique a parte que deve ser instalada no painel de gases.
- b) Coloque as extensões das canalizações até o ponto específico no painel ou tubulação até o ponto desejado.
- c) Teste todas as funções a fim de verificar se existe algum tipo de obstruções na canalização para a instalação de gases.
- d) Efetue as ligações de gases na parte correspondente do painel.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO

LIMPEZA

Para realizar a limpeza do Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância não será necessário desconectá-lo do local onde ele estiver sendo utilizado.

Realize a limpeza utilizando um pano umedecido em solução de água e sabão neutro, passando por toda a superfície do Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância e depois utilize um pano seco, limpo e macio para retirar o excesso.

ESTERILIZAÇÃO

Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, obedecendo às condições de aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.

• Álcool 70%

Para realizar a esterilização utilize álcool 70% na parte externa utilizando pano limpo e umedecido, e faça a secagem com um pano limpo, macio e seco.

• Autoclave e/ou Termodesinfectora

Os Circuitos Haoxi para Painel Régua Ambulância NÃO DEVEM ser submetidos a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suporta as temperaturas deste processo e serão danificados.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Transportar e Armazenar com cuidado, evitando quedas e choque mecânicos.
- Deve ser transportado com cuidado para garantir a integridade da embalagem.
- Guardar em local seco e fresco e ao abrigo da luz.
- Temperatura ambiente: -5°C até 50°C.
- Umidade Relativa: 10% até 95% não condensável.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para manter bom estado de conservação do produto, deve-se efetuar diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções de limpeza e desinfecção descritas anteriormente neste manual.

Em caso de furo/vazamento, o Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância deve ser descartado e substituído por um novo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:

- Conexão de entrada (Niple): Latão cromado;
- Conexão de saída (Niple): Latão cromado;
- Tarugo: Latão;
- Tubo para gases: Poliuretano (PU);
- Válvula de Impacto: Pino: Latão / Mola: Aço inoxidável / Anel O'ring: Borracha nitrílica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Comprimento: varia de acordo com a quantidade de pontos.

DESCARTE DO PRODUTO

O Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância NÃO PODE ser descartado em lixo comum ao final de sua vida útil, embora não haja riscos de contaminação enquanto o equipamento estiver em uso normal.

Descarte conforme a RDC nº 222, de 28 de março de 2018 e com os regulamentos ambientais e médicos locais.

TERMO DE GARANTIA

A Rioxi Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI, nos limites fixados neste termo de garantia, assegura como fabricante ao consumidor do produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, apresentado no prazo

de 1 ano para equipamentos e de 90 dias para acessórios, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Rioxi em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado, constante falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com a instrução de uso, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas pela Rioxi.

Obriga-se a Rioxi Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pelas despesas de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do produto, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota contiver rasuras ou modificações em seu teor.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro consumidor.

Os serviços em garantia serão prestados pela Rioxi ou seu representante devidamente autorizado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante e tenha sempre em mãos o número do lote do produto.