

EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI



Esta Instrução de Uso apresenta as informações necessárias para a correta utilização da Extensão em Nylon Trançado Haoxi.

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

FABRICADO POR:

Rioxi Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares EIRELI

Rua Anhembí, 80 – Jardim Caravelas – São Paulo/SP – CEP: 04728-010

CNPJ: 41.621.496/0001-06 – I.E.: 131.018.686.111 – AFE ANVISA nº: 8.23.535-9

Fone: +55 (11) 5642-1666 / 5642-0091 / 5642-0004 / 5642-2556

DISTRIBUIDO POR:

Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – São Paulo/SP – CEP: 04727-040

CNPJ: 05.678.146/0001-04 – IE: 116.613.824.117 – AFE ANVISA nº: 8.01.900-1

Fone: +55 (11) 5642-0587 – www.haoxi.com.br

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA

Nome Técnico: Extensão

Nome Comercial: Extensão em Nylon Trançado Haoxi

Número de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA: 82353599005

Responsável Técnico: Sibila de Carvalho Arruda – CRF/SP: 106904

DESCRIÇÃO

A Extensão de Nylon Trançado Haoxi é indicada para auxiliar na distribuição de gases medicinais da rede / válvulas medicinais para os equipamentos e outras aplicações médicas, facilitando o manuseio devido a sua flexibilidade e fácil identificação visual de gases devido à cor dos conectores (borboleta) e da extensão.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

As Extensões de Nylon Trançado Haoxi são utilizadas para auxiliar na distribuição de gases medicinais a partir de uma rede de posto ou válvulas instaladas em cilindros de gases medicinais para equipamentos e outras aplicações médicas. Contam com cores distintas para cada gás a ser utilizado, verifique através de identificação de cores da extensão e/ou conectores (borboleta) para aplicação apropriada.

APRESENTAÇÃO

As Extensões de Nylon Trançado Haoxi estão disponíveis conforme o tipo de gás medicinal, tamanho e modelo de conexão:

- **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA OXIGÊNIO COM CONEXÃO ABNT**

Código	Produto
EX2101	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M PARA OXIGÊNIO
EX2102	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M PARA OXIGÊNIO
EX2103	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M PARA OXIGÊNIO
EX2104	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M PARA OXIGÊNIO
EX2105	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M PARA OXIGÊNIO
EX2106	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M PARA OXIGÊNIO
EX2107	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M PARA OXIGÊNIO
EX2108	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M PARA OXIGÊNIO
EX2109	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M PARA OXIGÊNIO
EX2110	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M PARA OXIGÊNIO
EX2129	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M PARA OXIGÊNIO

- **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA OXIGÊNIO COM CONEXÃO DE ENTRADA EM L E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2126	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2144	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2145	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2146	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2147	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2148	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2149	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2151	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2152	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2153	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO
EX2154	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM CONEXÃO EM L PARA OXIGÊNIO

- **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA OXIGÊNIO COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO AFNOR E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2155	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2156	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2157	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2158	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2159	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2161	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2162	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2163	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2171	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2175	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO
EX2180	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA OXIGÊNIO

- **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA OXIGÊNIO COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO OHMEDA E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2164	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2165	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2166	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2167	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2168	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO

EX2169	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2179	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2184	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2185	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2186	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO
EX2196	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA OXIGÊNIO

- EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA AR COMPRIMIDO COM CONEXÃO ABNT**

Código	Produto
EX2111	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2112	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2113	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2115	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2116	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2120	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2128	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2197	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2198	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2199	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M PARA AR COMPRIMIDO
EX2200	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M PARA AR COMPRIMIDO

- EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA AR COMPRIMIDO COM CONEXÃO DE ENTRADA EM L E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2201	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2202	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO

EX2203	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2204	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2205	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2206	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2207	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2208	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2209	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2210	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO
EX2211	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM CONEXÃO EM L PARA AR COMPRIMIDO

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA AR COMPRIMIDO COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO AFNOR E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2172	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2176	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2181	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2212	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2213	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2214	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2215	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2216	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO

EX2217	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2218	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO
EX2219	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA AR COMPRIMIDO

- EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA AR COMPRIMIDO COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO OHMEDA E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2187	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2188	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2189	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2220	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2221	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2222	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2223	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2224	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2225	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2226	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO
EX2227	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA AR COMPRIMIDO

- EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA VÁCUO COM CONEXÃO ABNT**

Código	Produto
EX2117	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M PARA VÁCUO
EX2118	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M PARA VÁCUO

EX2119	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M PARA VÁCUO
EX2121	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M PARA VÁCUO
EX2228	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M PARA VÁCUO
EX2229	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M PARA VÁCUO
EX2230	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M PARA VÁCUO
EX2231	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M PARA VÁCUO
EX2232	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M PARA VÁCUO
EX2233	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M PARA VÁCUO
EX2234	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M PARA VÁCUO

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA VÁCUO COM CONEXÃO DE ENTRADA EM L E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2235	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2236	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2237	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2238	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2239	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2240	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2241	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2242	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2243	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2244	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO
EX2245	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM CONEXÃO EM L PARA VÁCUO

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA VÁCUO COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO AFNOR E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2174	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2178	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO

EX2182	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2246	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2247	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2248	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2249	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2250	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2251	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2252	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO
EX2253	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA VÁCUO

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA VÁCUO COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO OHMEDA E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2193	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2194	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2195	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2254	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2255	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2256	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2257	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2258	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO

EX2259	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2260	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO
EX2261	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA VÁCUO

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA ÓXIDO NITROSO (N₂O) COM CONEXÃO ABNT**

Código	Produto
EX2123	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2124	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2125	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2127	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2262	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2263	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2264	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2265	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2266	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2267	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2268	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA ÓXIDO NITROSO (N₂O) COM CONEXÃO DE ENTRADA EM L E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2269	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2270	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2271	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2272	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2273	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)

EX2274	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2275	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2276	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2277	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2278	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2279	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM CONEXÃO EM L PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA ÓXIDO NITROSO (N₂O) COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO AFNOR E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2173	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2177	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2183	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2280	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2281	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2282	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2283	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2284	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2285	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2286	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2287	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)

- **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA ÓXIDO NITROSO (N₂O) COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO OHMEDA E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2190	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2191	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2192	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2288	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2289	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2290	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2291	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2292	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2293	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2294	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)
EX2295	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)

- **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA GÁS CARBÔNICO (CO₂) COM CONEXÃO ABNT**

Código	Produto
EX2114	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2122	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2141	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2296	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2297	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2298	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2299	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)

EX2300	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2301	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2302	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2303	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA GÁS CARBÔNICO (CO₂) COM CONEXÃO DE ENTRADA EM L E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2304	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2305	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2306	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2307	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2308	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2309	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2310	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2311	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2312	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2313	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2314	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM CONEXÃO EM L PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA GÁS CARBÔNICO (CO₂) COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO AFNOR E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2315	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)

EX2316	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2317	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2318	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2319	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2320	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2321	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2322	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2323	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2324	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2325	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO AFNOR PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)

• **EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI PARA GÁS CARBÔNICO (CO₂) COM CONEXÃO DE ENTRADA ENGATE RÁPIDO OHMEDA E CONEXÃO DE SAÍDA ABNT**

Código	Produto
EX2326	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2327	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 1,5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2328	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 2 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2329	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 3 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2330	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 4 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2331	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 5 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2332	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 6 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)

EX2333	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 7 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2333	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 8 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2335	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 9 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)
EX2336	EXTENSÃO EM NYLON TRANÇADO HAOXI DE 10 M COM ENGATE RÁPIDO OHMEDA PARA GÁS CARBÔNICO (CO ₂)

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- A Extensão em Nylon Trançado Haoxi deve ser manuseada por pessoal qualificado e operado por pessoal treinado.
- É imprescindível a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUÇÃO antes de utilizar a Extensão em Nylon Trançado Haoxi em pacientes.
- A utilização do produto antes do completo entendimento das suas características e funções, resulta em condições de risco para o paciente e o próprio produto.
- Não utilize a Extensão em Nylon Trançado Haoxi se constatado vazamento; para verificar siga o procedimento abaixo:
 - a) Acople a Extensão em Nylon Trançado Haoxi a uma saída de gás através da conexão (borboleta).
 - b) Mergulhe em água em toda a extensão da Extensão em Nylon Trançado Haoxi e verifique se há o surgimento de bolhas.
 - c) Se for constatado vazamento contate a Assistência Técnica Rioxi.
- Não fume na área onde o produto está instalado e utilizado.
- Nunca use óleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o oxigênio, sob risco de explosão.
- Mantenha a Extensão em Nylon Trançado Haoxi limpa e em bom estado de conservação.
- A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas.
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada nesta instrução e uso.
- A não observância destas precauções será considerada como um mau uso do produto.
- Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE e/ou DESINFECTE a Extensão em Nylon Trançado Haoxi. A higienização é fundamental para evitar contaminação que podem prejudicar o profissional e o paciente.
- Não tente fazer qualquer reparo na Extensão em Nylon Trançado Haoxi.
- Só utilize a Extensão em Nylon Trançado Haoxi em perfeitas condições, qualquer anormalidade contate imediatamente o serviço de Assistência Técnica Rioxi.
- Ao contatar o serviço de Assistência Técnica da Rioxi, tenha em mãos a nota fiscal e o número de lote informado na embalagem do produto.
- A manutenção deste produto só deve ser feita por pessoal técnico treinado, qualificado e autorizado pela Rioxi.

- Sempre utilize a Extensão em Nylon Trançado Haoxi conforme o comprimento mínimo necessário e específica para o gás medicinal que será utilizado.
- Verifique se o produto está instalado adequadamente, cheque se não há vazamento, dobra ou estrangulamento no produto.
- Verifique o posicionamento da Extensão em Nylon Trançado Haoxi, deixando fácil acesso para manuseio e conforto para o paciente.
- Produto NÃO ESTÉRIL.
- A Extensão em Nylon Trançado Haoxi NÃO DEVE ser submetida a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suporta as temperaturas deste processo e será danificada.
- Este produto pode sofrer alterações, sem prévio aviso ao usuário.
- Não sobrecarregue os encaixes.

INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO E USO

1) Antes de utilizar a Extensão de Nylon Trançado Haoxi certifique-se:

- a) Que esteja limpa adequadamente;
- b) De realizar a instalação com as mãos limpas;
- c) Da isenção total de graxas e óleos;
- d) Da desobstrução plena dos conectores de gás;
- e) De que os pontos de gás estão ligados corretamente, conforme o a cor do conector (Borboleta/Engate Rápido AFNOR/Engate Rápido OHMEDA) e o tipo de gás medicinal a ser utilizado.

2) Procedimento para uso:

- a) Conectar a Extensão em Nylon Trançado Haoxi é muito fácil, basta rosquear o conector (Borboleta/Engate Rápido AFNOR/Engate Rápido OHMEDA) ao ponto de saída de gás medicinal (e depois os acessórios/equipamentos);
- b) Verifique a existência de vazamentos, periodicamente. Caso seja encontrada alguma espécie de vazamento contatar a Assistência Técnica Rioxi;
- c) A Extensão em Nylon Trançado Haoxi depois de conectada ao posto medicinal e ao acessório/equipamento irá suportar uma pressão de até 10 kgf/cm²; não sendo aconselhado exceder esse limite sob riscos de danos físicos e materiais com sua ruptura.

Atenção: Para uma nova utilização da Extensão em Nylon Trançado Haoxi limpe adequadamente. Após ter terminado o procedimento, realize a limpeza, desinfecção e/ou esterilização.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO

LIMPEZA

Para realizar a limpeza da Extensão de Nylon Trançado Haoxi não será necessário desconectá-la do local onde ele estiver sendo utilizado, por exemplo, do ponto de gás medicinal.

Poderá utilizar um pano limpo e macio, umedecido em solução de água e sabão neutro, para realizar a limpeza e após este processo faça a secagem utilizando um pano limpo, macio e seco para a remoção dos resíduos de limpeza.

ESTERILIZAÇÃO

Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, obedecendo às condições de aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.

• Óxido de etileno (ETO)

Ao utilizar Óxido de Etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.

A esterilização utilizando o gás óxido de etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C (130°F).

Após a esterilização em ETO, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.

• Autoclave e/ou termodesinfectora

Atenção: A Extensão em Nylon Trançado Haoxi NÃO DEVE ser submetida a autoclave e/ou termodesinfectora, pois não suporta as temperaturas deste processo e será danificada.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Transportar e Armazenar com cuidado, evitando quedas e choque mecânicos.
- Deve ser transportado com cuidado para garantir a integridade da embalagem.
- Guardar em local seco e fresco e ao abrigo da luz.
- Temperatura ambiente: -5°C até 50°C.
- Umidade Relativa: 10% até 95% não condensável.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para manter bom estado de conservação do produto, deve-se efetuar diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções de limpeza e desinfecção descritas anteriormente neste manual.

Em caso de furo/vazamento, as Extensões de Nylon Trançado Haoxi devem ser descartadas e substituídas por uma nova.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:

- Mangueira: Nylon trançado;
- Porca de conexão (Borboleta): Nylon com inserto em latão ou Zamac (conforme modelo);
- Conexão de entrada (Bico espigão): Latão cromado ou alumínio anodizado (conforme modelo);
- Abraçadeiras: Nylon;
- Conexão em L: Latão cromado (conforme modelo);

- Engate Rápido AFNOR: Latão cromado (conforme modelo);
- Engate Rápido OHMEDA: Latão cromado (conforme modelo).

MEDIDAS:

- Comprimentos: 1 m; 1,5 m; 2 m; 3 m; 4 m; 5 m; 6 m; 7 m; 8 m; 9 m; 10 m.

DESCARTE DO PRODUTO

A Extensão em Nylon Trançado Haoxi NÃO PODE ser descartada em lixo comum ao final de sua vida útil, embora não haja riscos de contaminação enquanto o equipamento estiver em uso normal.

Descarte conforme a RDC nº 222, de 28 de março de 2018 e com os regulamentos ambientais e médicos locais.

TERMO DE GARANTIA

A Rioxi Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI, nos limites fixados neste termo de garantia, assegura como fabricante ao consumidor do produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, apresentado no prazo de 1 ano para equipamentos e de 90 dias para acessórios, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Rioxi em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado, constante falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com a instrução de uso, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas pela Rioxi.

Obriga-se a Rioxi Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pelas despesas de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

A considerar, o consumidor que não apresentar a Nota Fiscal de Compra do produto, será também considerada nula sua garantia, bem como se a Nota contiver rasuras ou modificações em seu teor.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro consumidor.

Os serviços em garantia serão prestados pela Rioxi ou seu representante devidamente autorizado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante e tenha sempre em mãos o número do lote do produto.