

Agulha Hipodérmica Descartável Descarpack

A Agulha Hipodérmica Descartável Descarpack foi desenvolvida para a aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração.

A agulha está disponível em diferentes tamanhos, atendendo a diferentes objetivos de uso.



Cânula fabricada em aço inoxidável;



Canhão confeccionado em polipropileno identificado por código de cores universal, conforme a ISO 6009:2016;



Canhão com conicidade de 6%, permitindo conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock;



Lubrificada, oferecendo punção mais suave;



Bisel trifacetado;



Atóxica e apirrogênica;



Aprovada pelo INMETRO;



Produto descartável e de uso único.



INDICAÇÕES DE USO

A Agulha Hipodérmica da Descarpack é indicada para uso médico e hospitalar, a administração de soluções e medicamentos pela via parenteral (subcutânea, intramuscular e endovenosa), além de poder ser utilizada para coleta sanguínea e de outros fluidos corpóreos.



INSTRUÇÕES DE USO

- 1 Escolha o tipo de agulha que será usada, conforme o calibre;
- 2 Abra o envelope do produto na área indicada, expondo, desta forma, o canhão da agulha;
- 3 Conecte a seringa no canhão exposto com pressão e rosqueie no sentido horário;
- 4 Remova o protetor da agulha e o produto estará pronto para ser usado;
- 5 Após o procedimento, acione o dispositivo de segurança empurrando-o sobre a agulha usada;
- 6 Após o uso, descarte a agulha em um lugar apropriado.



1



2



3



4



5



6



100
UNIDADES

Cartucho com
100 unidades.



COR:
ROXO



DIMENSÕES DA AGULHA:

20 x 0,55mm
24G ½"

REF.:

0630701



DESCARPack
Eficiência em Descartáveis