




Equipo Multivias com Clamp Descarpack

4 vias

DESCRIÇÃO

O **Equipo Multivias com Clamp Descarpack 4 vias**, é um produto médico hospitalar, de uso único, estéril, atóxico, livre de pirogênios e isento de látex. Possui tubo flexível de 18 cm, apresenta a forma geral de um “Y” e é formado por quatro ramos incolores distais, cada um com clamp corta fluxo, um conector intermediário que faz a ligação entre os ramos distais e o ramo proximal. Os ramos distais, Luer Lock, se conectam a dois sistemas de infusão diferentes e o ramo proximal, Luer Slip, faz conexão com o acesso venoso.

PRODUTO

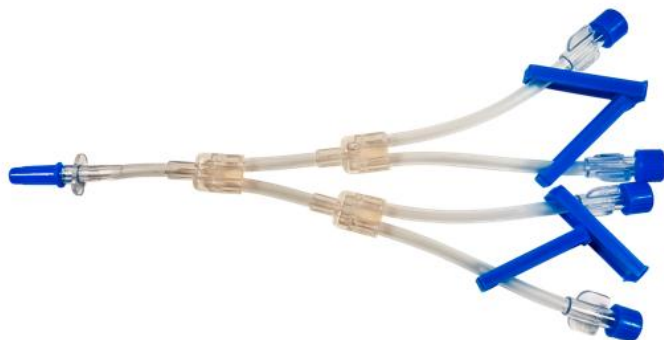

Notificação Anvisa: 10330660264

Fabricante: Jiaxing Jiu Hai Medical Technology Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

O **Equipo Multivias com Clamp** têm como função quadruplicar o acesso venoso, conectando quatro vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso

venoso (escalpe, cateter, agulha).

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Equipo Multivias com Clamp** é disponível no modelo com clamp corta fluxo, quatro conectores para sistemas diferentes de infusão e um conector para o acesso venoso no paciente.

COMPOSIÇÃO

- **Tampas Protetoras:** Polipropileno (PP);
- **Conector Luer Lock e Luer Slip:** Policloreto de Vinila (PVC);
- **Clamp Corta Fluxo:** Polietileno (PE);
- **Conector Quatro Vias:** Policloreto de Vinila (PVC);
- **Tubo Flexível:** Policloreto de Vinila (PVC) flexível.

VALIDADE

05 (cinco) anos após a data de esterilização.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Quant. Pacote	Quant. Caixa Master
Multivias 4 vias	0413401	30 unidades	600 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

1. Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade (utilizar somente se a embalagem estiver intacta);

2. Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
3. Retirar o Equipo Multivias da embalagem;
4. Fechar os Clamps;
5. Fazer a conexão do Equipo Multivias aos componentes necessários ao uso indicado;
6. Abrir os Clamps e regular o fluxo;
7. Ao final do procedimento, retirar o Equipo Multivias e descartá-lo em recipiente apropriado.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Este dispositivo é indicado para utilização em pacientes adultos.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada;
- Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções de uso;
- Produto médico hospitalar de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Esterilizado por óxido de etileno;
- Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Descartar em local apropriado após o uso.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

Em atendimento ao Art.5º item V da IN 04/2012 esta Ficha Técnica pode ser solicitada através do e-mail:
descarpack@descarpack.com.br