

INSTRUÇÃO DE USO

AGULHA DE INJEÇÃO

Agulhas descartáveis

INDICAÇÃO DE USO

O produto serve para ser utilizado com endoscópio para o tratamento de injeção de varizes esofágicas e gástricas, e a injeção de submucosa no trato Gastro Intestinal.

MODO DE USO

Preparação antes de utilizar

1. Inspeção de embalagem asséptica: inspecione se está fraturado, mal vedado ou encharcado.
2. Inspeção de aparência: Retire o produto da embalagem; inspecione o tubo interior e exterior para verificar se estão torcidos, dobrados ou fraturados. Inspecione os componentes para verificar se deslizaram, estão soltos ou partidos.
3. Inspeção de operação: Desdobre e estique o tubo exterior; empurre o tubo traseiro para o tubo exterior até ouvir um clique para assegurar que o tubo da Agulhas está fora do procurador; puxe o punho traseiro até ouvir um clique e assegure-se que o tubo das Agulhas foi retirado do procurador.

Observação: Todas as ações devem ser realizadas cuidadosamente.

4. Inspeção de injeção: Em relação ao passo 3, empurre o punho traseiro para a ponta para expor o tubo das Agulhas fora do procurador; conecte a junção do cone do punho traseiro com a seringa de injeção, que está cheio com medicamento líquido; empurre a seringa para drenar o ar até que saia o medicamento líquido; assegure-se que não existe vazamento de medicamento de outros lugares exceto a ponta das Agulhas.

Inserir no endoscópio

5. Em relação ao passo 3, puxe o punho traseiro para a ponta para retirar o tubo das Agulhas para o procurador; insira o tubo exterior no canal do endoscópio e empurre lentamente o tubo exterior até que o procurador e a ponta do tubo exterior estejam na vista do endoscópio.

Observação: durante os passos 5 e 10, assegure-se que puxa o punho traseiro para a ponta; existe um clique quando o punho traseiro estiver completamente puxado. A finalidade da operação acima é de evitar danos no canal do endoscópio quando inserir ou retirar os produtos, assim como o dano nos pacientes no caso do tubo das Agulhas sair subitamente do endoscópio.

6. Escolha a posição de injeção correta através o endoscópio e mantenha a visualização do endoscópio.

Punção e injeção do medicamento líquido

7. Empurre o punho traseiro para o punho frontal até ouvir um clique para assegurar que o tubo das Agulhas está fora do procurador

Observação: durante o passo 7, certifique-se que empurra o punho traseiro para a ponta; existe um clique quando o punho traseiro tiver sido empurrado para a posição correta e o tubo das Agulhas tiver saído completamente do procurador. O objetivo dos passos acima é de evitar a retração do tubo das Agulhas enquanto realiza o passo 8 que pode resultar na falha da inserção do tecido alvo.

8. Insira o tecido alvo; empurre a posição da seringa para terminar a operação de injeção.

9. Retire as Agulhas após a injeção.

Aviso: repita os passos acima (6-9) se necessário.

Retirar as Agulhas de Injeção

10. Após a operação, puxe o punho traseiro até ouvir um clique; o tubo das Agulhas regressa para o procurador; retire o dispositivo do endoscópio.

Observação: durante os passos 5 e 10, assegure-se que puxa o punho traseiro para a ponta; existe um clique quando o punho traseiro estiver completamente puxado. A finalidade da operação acima é de evitar danos no canal do endoscópio

quando inserir ou retirar os produtos, assim como o dano nos pacientes no caso do tubo das Agulhas sair subitamente do endoscópio.

Eliminação

1.1. Elimine este dispositivo de acordo com os padrões hospitalares reconhecidos.

ADVERTÊNCIAS

PROIBIDO REPROCESSAR.

Só para utilização Única; descarte após a utilização e a reutilização é proibida.

Os operadores deste produto devem ser médicos ou funcionários médicos bem treinados na terapia endoscópica ou injeção de mucosa.

Antes de inserir ou retirar o dispositivo, certifique-se de que o tubo das agulhas foi retirado para o procurador para evitar danos no endoscópio.

O procedimento de injeção deve ser sob a observação do endoscópio.

PRECAUÇÕES

Não utilize o instrumento quando a embalagem estiver danificada.

Não utilize este produto quando o período de validade estiver ultrapassado.

EMBALAGEM

O produto deve ser armazenado em local ventilado, seco e não corrosivo e a umidade relativa deve ser inferior a 80%.

ESTÉRIL – Esterilizado por Óxido de Etileno

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelos	Diametro Externo	Tamanho Agulha
VDK-IN-18-120-2205-A	O.D. 1.8*1200mm	Tamanho agulha 22G, 5mm Agulha
VDK-IN-18-120-2304-A	O.D. 1.8*1200mm	Tamanho agulha 23G, 4mm Agulha
VDK-IN-18-120-2504-A	O.D. 1.8*1200mm	Tamanho agulha 25G, 4mm Agulha
VDK-IN-18-180-2204-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 22G, 4mm Agulha
VDK-IN-18-180-2205-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 22G, 5mm Agulha
VDK-IN-18-180-2206-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 22G, 6mm Agulha
VDK-IN-18-180-2304-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 23G, 4mm Agulha
VDK-IN-18-180-2305-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 23G, 5mm Agulha
VDK-IN-18-180-2306-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 23G, 6mm Agulha
VDK-IN-18-180-2504-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 25G, 4mm Agulha
VDK-IN-18-180-2505-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 25G, 5mm Agulha
VDK-IN-18-180-2506-A	O.D. 1.8*1800mm	Tamanho agulha 25G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-180-1904-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 19G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-180-1905-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 19G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-180-1906-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 19G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-180-2104-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 21G, 4mm Agulha

VDK-IN-23-180-2105-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 21G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-180-2204-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 22G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-180-2205-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 22G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-180-2206-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 22G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-180-2304-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 23G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-180-2305-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 23G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-180-2306-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 23G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-180-2504-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 25G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-180-2505-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 25G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-180-2506-A	O.D. 2.3*1800mm	Tamanho agulha 25G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-230-1904-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 19G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-230-1905-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 19G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-230-1906-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 19G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-230-2005-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 20G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-230-2104-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 21G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-230-2105-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 21G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-230-2106-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 21G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-230-2204-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 22G, 4mm Agulha

VDK-IN-23-230-2205-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 22G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-230-2206-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 22G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-230-2304-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 23G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-230-2305-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 23G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-230-2306-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 23G, 6mm Agulha
VDK-IN-23-230-2503-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 25G, 3mm Agulha
VDK-IN-23-230-2504-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 25G, 4mm Agulha
VDK-IN-23-230-2505-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 25G, 5mm Agulha
VDK-IN-23-230-2506-A	O.D. 2.3*2300mm	Tamanho agulha 25G, 6mm Agulha

Fabricante/distribuidor:

Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co., Ltd
Nº 52 Guoxiang Road, Wujin Economic Development Zone,
Changzou, Jiangsu
China

Detentor da Notificação:

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.
Rua Batataes, 391, conj. 11, 12 e 13 – Jd. Paulista.
São Paulo, CEP: 01423-010
Telefone: (11) 3885-7633
CNPJ: 04.718.143/0001-94
Registro ANVISA nº: 80102519078