

INSTRUÇÕES DE USO

Fabricante: Pion G Plus LTDA – **CNPJ:** 01.675.208/0001-73

Endereço: Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 56, Parque Pentagna – Valença, RJ, CEP 27.601-668

Site: www.piong.com.br

Informações de identificação:

- **Produto (Família):** Campo cirúrgico estéril Pion G
- ANVISA nº 80342069001
- Produto fornecido Estéril. Esterilizado por gás óxido de etileno (ETO);
- Produto de uso único. Proibido o reprocessamento.

Informações e orientações para uso:

Modo de uso:

- Com as mãos higienizadas e a devida paramentação cirúrgica, abrir o envelope grau cirúrgico no local indicado com seta de abertura e retirar o produto;
- Utilizar técnica asséptica durante o manuseio e posicionar o produto sobre a superfície a ser isolada no paciente;
- Abrir a dobra do produto de modo a manter a assepsia do mesmo;
- Descartar após o uso como lixo infectante.

Indicação e orientações gerais:

- Esta família de produtos é destinada à utilização hospitalar para criar barreira física que delimita a área onde a cirurgia será realizada, evitando que tecidos e órgãos não envolvidos no procedimento sejam contaminados por microrganismos, além de auxiliar na manutenção da temperatura corporal do paciente e a controlar a propagação de fluidos corporais. Os modelos que contém fenestra permite o acesso à área a ser operada, enquanto o restante do campo mantém a esterilidade das demais áreas no paciente.
- Deve ser utilizado por profissionais da área da saúde responsáveis pela preparação de área cirúrgica;
- Validade do produto: **02 anos**;
- Vida útil: **até 24 horas**, devendo ser descartado ao final do procedimento cirúrgico;
- Em caso de ocorrência de incidente com os produtos relacionados no presente documento, o usuário deve comunicar ao fabricante e à autoridade competente em seu local;
- Em caso de dúvidas referente à composição do produto adquirido, consultar o fabricante;
- Este documento pode ser fornecido em cópia impressa caso solicitado pelo usuário, devendo a solicitação ser formalizada através dos meios de comunicação disponíveis no website.

Advertências e precauções:

- Não utilizar em caso de danos ou abertura na embalagem, pois a esterilização fica comprometida;
- Somente utilizar o produto dentro do prazo de validade indicado no rótulo da embalagem;
- Os **CAMPOS CIRÚRGICOS ESTÉRIL PION G** não devem ser usados próximos a fontes de calor, e não manter contatos com solventes orgânicos voláteis;
- Não possuem efeitos colaterais decorrentes da utilização ou contraindicações;
- O transporte deve ser feito em veículos para carga seca.

Armazenamento, Manuseio e Conservação:

- Descartar como lixo infectante após o uso, destinando conforme os procedimentos e/ou gerenciamento de resíduos de produtos para saúde;
- Armazenar em local fresco e arejado, na temperatura de 4°C a 32°C e umidade de 10% a 90%, evitar o contato direto com o solo, com a luz solar e umidade, e manter longe de produtos químicos;
- Os produtos devem ser manuseados com as mãos devidamente higienizadas e respeitando-se o modo de abertura da dobra de cada modelo de produto.

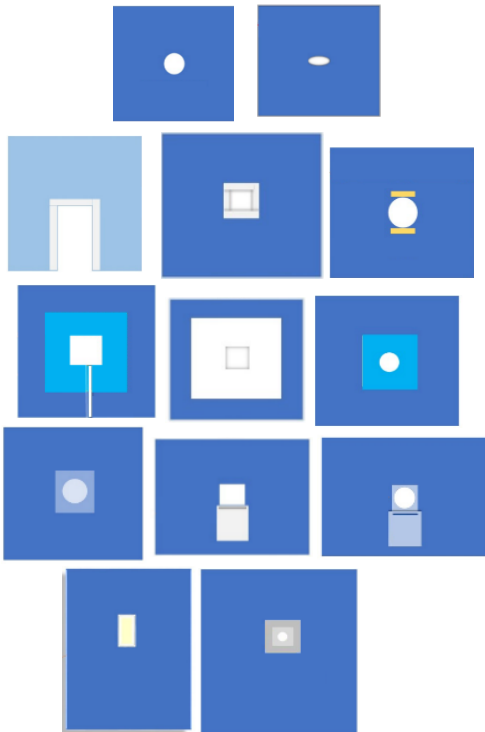
Dados Técnicos:

- Alta resistência, conforto e maleabilidade;
- Alta barreira de proteção;
- Hipoalergênico, atóxico, não irritante e não sensibilizante;
- Resistente ao rasgo e à tração;
- Isento de látex em sua composição;
- Proteção do usuário contra contaminações cruzadas em centros cirúrgicos;
- Os tamanhos podem variar de acordo com a necessidade do cliente e as características exigidas, não podendo ser inferiores as medidas mínimas estipuladas nas normas técnicas específicas.

Formas de Apresentação da Embalagem:

- **Embalagem primária:**
- Papel grau cirúrgico com quantidade a depender do código do produto.
- **Embalagem secundária:**
- Caixa papelão arte cor azul (para produtos estéreis) com quantidade a depender do código do produto.

Modelos:

Componente	Tamanhos e Cores	Material utilizado	Finalidade de uso
Campo Cirúrgico - Simples	- Comprimento: 0,30 metros até 4,00 metros; - Largura: 0,30 metros até 4,00 metros 	Não Tecido de SSMMMS ou Laminado. Gramatura de 35 até 60g/m²	Criar barreira física que delimita a área onde a cirurgia será realizada, evitando que tecidos e órgãos não envolvidos no procedimento sejam contaminados por microrganismos, além de auxiliar na manutenção da temperatura corporal do paciente e a controlar a propagação de fluidos corporais.
Campo Cirúrgico - Com janela	- Comprimento: 0,30 metros até 4,00 metros; - Largura: 0,30 metros até 4,00 metros 	Não Tecido de SSMMMS ou Laminado. Gramatura de 35 até 60g/m²	Criar barreira física que delimita a área onde a cirurgia será realizada, evitando que tecidos e órgãos não envolvidos no procedimento sejam contaminados por microrganismos, além de auxiliar na manutenção da temperatura corporal do paciente e a controlar a propagação de fluidos corporais. A janela permite o acesso à área a ser operada, enquanto o restante do campo mantém a esterilidade das demais áreas no paciente.

Componente	Tamanhos e Cores	Material utilizado	Finalidade de uso
Campo Cirúrgico - Com fita	- Comprimento: 0,30 metros até 4,00 metros; - Largura: 0,30 metros até 4,00 metros 	Não Tecido de SSMMS, TNT ou Laminado. Gramatura de 35 até 60g/m²	Criar barreira física que delimita a área onde a cirurgia será realizada, evitando que tecidos e órgãos não envolvidos no procedimento sejam contaminados por microrganismos, além de auxiliar na manutenção da temperatura corporal do paciente e a controlar a propagação de fluidos corporais.
Campo Cirúrgico - Com reforço	- Comprimento: 0,30 metros até 4,00 metros; - Largura: 0,30 metros até 4,00 metros 	Não Tecido de SSMMS ou Laminado. Gramatura de 35 até 60g/m²	Criar barreira física que delimita a área onde a cirurgia será realizada, evitando que tecidos e órgãos não envolvidos no procedimento sejam contaminados por microrganismos, além de auxiliar na manutenção da temperatura corporal do paciente e a controlar a propagação de fluidos corporais.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Geomar Nunes da Costa- CRQ 03314371 - 3ª Região – RJ.

HISTÓRICO DE MODIFICAÇÃO				
NÍVEL DE REVISÃO	DESCRIÇÃO	ELABORADO POR	APROVADO POR	DATA
00	Emissão inicial	Maria Porto	Geomar Nunes	19/06/2023
01	Revisão geral dos tópicos de especificação e apresentação dos modelos em desenho; revisada indicação de uso.	Maria Porto	Geomar Nunes e Cintia Salgado	31/08/2025