

PROTECT SEAL PEDAL 42CM

(seladora com regulagem de temperatura e acionamento através de pedal)

UTILIZAÇÃO:

Para selar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico/plástico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Seladora com acionamento através de pedal, com controle de temperatura analógico por termostato.

Bandeja (mesa) para apoio com regulagem de altura.

Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto.

Sistema para aquecimento com resistência blindada.

Pintura epóxi eletrostática na cor branca.

Área para selagem: 42cm.

Largura para selagem: 13mm.

Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (127/220 V) automático.

Frequência: 50/60 Hz.

Potência máxima: 400 W.

Temperatura: até 300°C.

INSTRUÇÕES PARA USO:

1. Para ligar:

Utilizar tomada de três pinos com aterramento conforme padrão brasileiro (NBR 14136).

Conectar o cabo de alimentação à rede elétrica 127 ou 220 V.

Para usar o equipamento, acionar o botão no indicador RESET.

Girar o botão regulador (termostato) na temperatura desejada, observar que a barra de selagem começara a aquecer.

2. Para selar o papel grau cirúrgico:

Girar o botão termostato na temperatura desejada.

Aguardar de 3 a 8 minutos para que o produto atinja a temperatura ideal para selagem.

Posicione o papel grau cirúrgico na barra de selagem sempre com o lado do papel para baixo e a parte do plástico/filme para cima.

Atenção: nunca coloque o plástico/filme na barra de selagem, se isso ocorrer, a barra poderá ficar com resíduos (tipo marrom), comprometendo a eficácia da selagem.

Pressionar moderadamente com o pé (via pedal) a parte superior da **PROTECT SEAL PEDAL 42CM**, entre 5 a 7 segundos ou até que ocorra o selamento adequado do papel grau cirúrgico.

3. Para selar plástico/plástico:

Girar o botão regulador (termostato) na temperatura desejada, observar que a barra de selagem começara a aquecer.

Aguardar de 3 a 8 minutos para que o produto atinja a temperatura ideal para selagem.

Posicionar o plástico na barra de selagem.

Pressionar moderadamente a parte superior do produto, entre 5 a 7 segundos ou até que ocorra o selamento adequado do material.

Observação: para embalagens de maior ou menor espessura, aumentar ou diminuir a temperatura, de acordo com a orientação do fabricante do material.

4. Para desligar:

Girar o botão regulador de temperatura (termostato) até a posição desligado.



Apertar/acionar o botão no indicador OFF, observar que apagara a luz do botão.

Por medida de segurança sempre, ao término do expediente de trabalho, antes de realizar procedimentos de limpeza e/ou substituições de componentes, desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica.

5. Para substituição da fita isolante:

Sempre que necessário realizar a substituição (p.ex. caso esteja danificada, com excesso de sujeira e/ou gasta).

Desligar o produto (seguir item 4).

Realizar a troca da fita isolante de acordo com as orientações do fabricante do material.

6. Para limpar a área de selagem:

Desligar o produto (seguir item 4).

Aguardar o produto esfriar totalmente.

Com auxílio de um pano levemente umedecido com álcool 70, passar delicadamente na fita isolante até que saia toda a sujeira.

Caso a fita isolante esteja danificada, com excesso de sujeira e/ou gasta a realizar a substituição da mesma.

Aguardar 5 minutos para utilizar o produto novamente.

O acúmulo de resíduos pode prejudicar a selagem e reduzir a vida útil do produto.

GARANTIA:

A AGIR concede garantia contra defeitos de fabricação.

A garantia é válida durante os prazos constantes na tabela abaixo, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor, onde deverá constar o número de série do produto.

Legal	Contratual	TOTAL
3 meses	9 meses	12 meses

A fita teflon possui garantia Legal de 3 meses.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidades de manutenção e/ou reparo, o consumidor deverá entrar em contato com a AGIR, através de um dos meios de comunicação:

Site: www.agir.ind.br

E-mail: agir@agir.ind.br

Fone: (16) 3329-0559

WhatsApp: (16) 98242-6000

Durante o período de garantia, nenhum serviço poderá ser executado, senão através direta da fábrica.

O que a garantia não abrange:

Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso.

Atendimento domiciliar.

Consertos por pessoas ou empresas não credenciadas pela AGIR.

A AGIR obriga-se a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este manual com nota fiscal de compra sempre em mãos.

APRESENTAÇÃO:

01 PROTECT SEAL PEDAL 42CM.

PESO BRUTO:

12,170 kg

MEDIDAS DA EMBALAGEM:

Altura: 1.05m | Largura: 56cm | Comprimento: 36cm

MEDIDAS DO PRODUTO:

Altura: 97cm | Largura: 55cm | Comprimento: 35cm

IMAGENS DO PRODUTO:**CÓDIGO DO PRODUTO:**

PA033

CÓDIGO DE BARRAS:

0742832188203

NCM:

85158090



Produto trabalha em alta temperatura, tenha cuidado para não tocar acidentalmente na parte quente (barra de selagem).
O aterramento é essencial para a segurança do operador e garantia de seu produto.



Informativo

Por isso o pino central (aterramento) nunca deve ser retirado.

A AGIR não se responsabiliza por danos causados por instalação e/ou oscilação de rede elétrica.

Uso profissional.

Manter longe do alcance das crianças.

Manter seco.

Manter ao abrigo do sol.

Isento de registro na ANVISA.



AGIR Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ 18.311.257/0001-20

Rua Domingos Padovan, 1171 | Jardim Anhanguera | CEP 14092-040 | Ribeirão Preto | SP | (16) 3329.0559

agir.ind.br | agir@agir.ind.br | Skype: agir.ind | Facebook/agir.ind | Youtube: CANAL AGIR

AGIR, por você!

