

# AVENTAL PERIAPICAL, SEM PROTETOR DE TIREOIDE

Linha paciente

- AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA
- SEM PROTETOR DE TIREOIDE
- PARA USO EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL
- ADULTO, TAMANHOS:  
100x60cm, 85x60cm e 76x60cm
- EQUIVALÊNCIAS PB: 0,25mm e 0,50mm



- AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA
- SEM PROTETOR DE TIREOIDE
- PARA USO EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL
- INFANTIL, TAMANHO: 60x50cm
- EQUIVALÊNCIAS PB: 0,25mm e 0,50mm



ANVISA: 10376790004

Não é destinado para uso profissional

Cores PRIME





**N MARTINS INDÚSTRIA E COM. EIRELI-ME.**  
**Rua Rio Negro nº 10**  
**Colombo – PR**

**www.nmartins.com.br**

Esta embalagem contém

- ☐ Avental de Borracha Plumbífera Profissional



- ☐ Avental de Borracha Plumbífera



- ☐ Protetor de Tireóide Profissional  
☐ Adulto  
☐ Infantil



- ☐ Saiote Plumbífero



- ☐ Blusa Plumbífera



- ☐ Protetor de Gônadas



- ☐ Luva Plumbífera



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Parabéns

Você acaba de adquirir uma vestimenta proteção contra raios X **N MARTINS**, confiança com mais de 30 anos no mercado.

### IMPORTANTE

- ✓ Leia atentamente e siga rigorosamente estas instruções de uso.
- ✓ Não exponha ou guarde este produto nas proximidades do fogo ou fontes intensas de calor, ao gelo ou frio intenso. Assim como, não coloque em contato com objetos muito quentes ou muito frios.
- ✓ Quando não estiver em uso mantenha este produto no suporte para aventais **N MARTINS** e em local seco.
- ✓ Não dobre.
- ✓ Este produto não deve ser utilizado se estiver danificado.
- ✓ Apresente estas instruções aos usuários deste produto.
- ✓ Este produto não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade além das indicadas pela **N MARTINS**.
- ✓ **Preserve estas instruções.**
- ✓ **A N MARTINS não se responsabiliza pelo uso inadequado deste produto.**

### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento dos aventais de proteção está baseado no princípio da interposição de material atenuador entre a fonte de radiação e a pessoa a ser protegida.

Qualquer vestimenta de proteção contra raios X serve para:

- reduzir o nível de radiação, a que o usuário está submetido, ainda que não sejam ultrapassados os valores máximos permitidos mesmo quando a vestimenta não estiver sendo usada,
- proteção adicional de órgãos ou tecidos especialmente sensíveis das pessoas expostas.

Nenhuma vestimenta garante a proteção total, seja contra o feixe primário seja contra o secundário. Por exemplo, para um feixe gerado à tensão de 90 kVp, com 3 mmAl de filtração, 8% da radiação do feixe primário ou 7% da radiação secundária passarão através de uma vestimenta com equivalência de 0,25 mmPb.

A quantidade de radiação recebida pelo usuário dependerá da rigorosa observação de procedimentos de segurança contra as radiações ionizantes, além da correta utilização dos acessórios de proteção **N MARTINS**.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ✓ EM BORRACHA PLUMBÍFERA: É cuidadosamente confeccionado com material submetido a rigoroso controle de qualidade. Utilizando-se de uma ou duas lâminas absolutamente contínuas (sem emendas) de borracha plumbífera, com as seguintes equivalências: 0,25 mm, 0,35 mm e 0,50 mm de chumbo, para a faixa de energias do radiodiagnóstico médico e odontológico.
- ✓ Este produto é uma vestimenta de proteção contra a radiação X.
- ✓ Já vem pronto para uso.
- ✓ Destina-se à proteção da região frontal do usuário.
- ✓ Deve ser utilizado:
  1. por profissionais (cirurgiões dentistas, médicos, médicos veterinários e técnicos ou operadores de equipamentos de raios X) durante a realização de procedimentos radiográficos;
  2. para a proteção dos pacientes próximos quando da realização de exames em leitos de enfermarias, UTIs, etc.;
  3. para a proteção das partes do paciente examinado que estejam fora da área de interesse (quando não interferir com os propósitos do exame);
  4. para proteção de acompanhantes que devam amparar o paciente durante a realização do exame.

## MODO DE USAR

- ✓ Coloque o avental modo a cobrir a parte a ser protegida.
- ✓ Ajuste-o corretamente.
- ✓ Feche o velcro ou o cinto.
- ✓ Assegure-se de que o produto não esteja dobrado.
- ✓ Quando não estiver em uso mantenha este produto no suporte para aventais **N MARTINS** e em local seco.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- ✓ Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação.
- ✓ Limpe este produto com um pano macio umedecido e sabão neutro
- ✓ Para desinfecção deve ser utilizado um pano macio umedecido com álcool 70.

## ✓ TERMO DE GARANTIA

A **N MARTINS** garante este produto contra defeitos de fabricação por noventa dias, a partir da data de compra, nos termos da lei nº 8078, de 11/09/90.

Registro da ANVISA: 10376790004

## SAC – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A **N MARTINS** mantém assistência técnica permanente. Em caso de dificuldades entre em contato com o revendedor ou com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor **N MARTINS**.

[nmartins@nmartins.com.br](mailto:nmartins@nmartins.com.br)

41 3666.1919, ou

Rua Rio Negro, 10 – JD Guaraituba

CEP 82501-970 - Colombo – PR

Preencha os itens abaixo, para tê-los disponíveis se você precisar de serviços de manutenção da **N MARTINS**.

MODELO DO PRODUTO:

Nº DA NOTA FISCAL:

REVENDEDOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DO CA / LINHA PROFISSIONAL:

## FALE COM A GENTE

Obrigado por adquirir um produto **N MARTINS**.

De onde estiver, você poderá falar com a gente, para esclarecer dúvidas e transmitir opiniões através do SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor **N MARTINS**.

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Nome da Empresa     | N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| CNPJ                | 81.196.586/0001-03                     |
| Autorização         | 1.03.767-9                             |
| Produto             | VESTIMENTAS DE RADIOPROTEÇÃO           |

| Modelo Produto Médico          |
|--------------------------------|
| AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA |
| PROTETOR DE TIREOIDE           |
| SAIOTE PLUMBÍFERO              |
| BLUSA PLUMBÍFERA               |
| PROTETOR DE GÔNADAS            |
| LUVA PLUMBÍFERA.               |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                             | Expediente, data e hora de inclusão |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | MANUAL DE INSTRUÇÕES SIMPLES (1).pdf | 0420434224 - 02/02/2022 10:50:54    |
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Manual Instruções.pdf                | 0420434224 - 02/02/2022 10:50:54    |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Nome Técnico           | Artigo Para Radioprotecao              |
| Registro               | 10376790004                            |
| Processo               | 25351813817201616                      |
| Fabricante Legal       | N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Classificação de Risco | I - BAIXO RISCO                        |
| Vencimento do Registro | VIGENTE                                |
| Situação               | [sem dados cadastrados]                |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados]                |